

# BRUGSANVISNING

Aluminiumskørestol, der stabiliserer ryggen og hovedet

Produktkode: ALH008




## 1. Udførelse

Kørestolen er udført i et aluminiumsstel forstærket m. en dobbeltkryds og en ekstra tværstabiliseringsløsning til ledsageren på skubbehåndtagene. Kørestolen har et ryglæn og et nylon-/bomuldssæde, som er ekstra blødt takket være et luftgennemtrængeligt overtræk. Kørestolen er udstyret m. et ryglæn m. forlængelse, en hovedpude, anti-tip-hjul og tromlebremsen til ledsageren. Muliggør justering af ryglænets hældningsvinkel i området fra 0° til 90° og vinkeljustering af benstøtter. Armlænet i lang version er aftageligt. 24" baghjul m. luftgummidæk og plastdrivringe og 8" fulde gummiforhjul m. en øget slidstyrke.

**Sættet indeholder:** et kørestolsstel m. sæde, højre benstøtte m. fodplade, venstre benstøtte m. fodplade, en nakkestøtte, et betræk m. en pude til stabilisering af hovedet, en dækpumpe og et nøglesæt.

### Kørestolens elementer:

- a. håndtag
- b. tromlebremse til ledsageren
- c. ryglængshældningsjustering
- d. armlæn
- e. monteringsdrejeknap
- f. parkeringsbremse
- g. fastgørelsesskrue til tværstabilisering
- h. drivring
- i. lægstøtte
- j. benstøtte
- k. benstøttehåndtag
- l. monteringsbolt til benstøtte

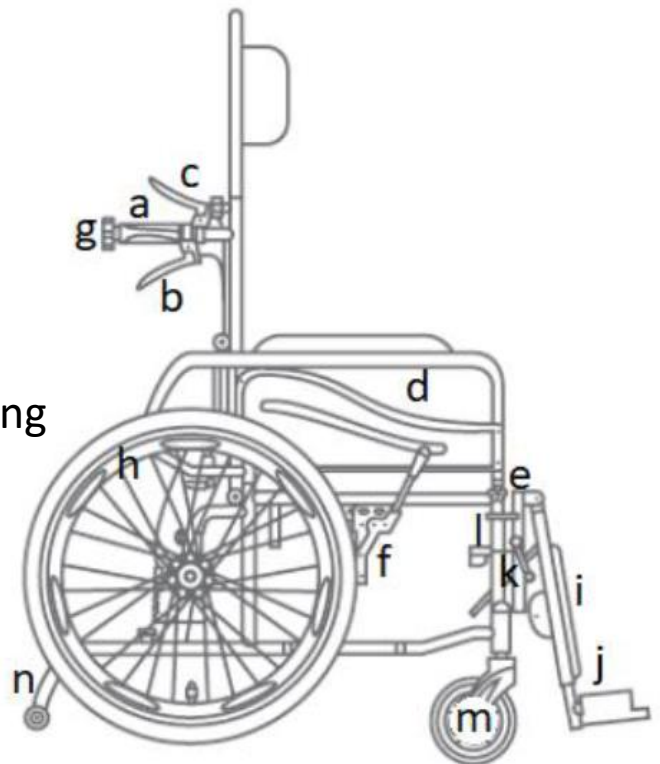

- m. justering af tyngdepunkt
- n. anti-tip-hjul

## 2. Anvendelse

En aluminiumskørestol er et hjælpemiddel designet til personer, der har problemer m. selvstændig bevægelse og til personer m. nedsat funktion og bevægelsesbegrænsninger. Den drives frem af brugeren el. skubbes frem af en ledsager. Kørestolen kan bruges både indendørs og udendørs. Kørestolen er beregnet til personer, der har bevægelsesbesvær som følge: lammelse, cerebral parese, efter benskader el. benamputation, degenerative forandringer i el. deformation af ben el. arme, hjerte- og karsygdomme, cirkulationsforstyrrelser, overvægt el. sygelig undervægt.

## 3. Montering

### OPKLAPNING OG MONTERING

**Trin 1. Opklapning af kørestolen** Stil kørestolen på underlaget. Klap kørestolen op vha. håndtagene, der er anbragt bakerst på ryglænet. Tryk dernæst på sædekanterne forrest og bakerst, så alle dele af kørestolen er nøje afstemt m. hinanden. **Trin 2. Montering af benstøtter** Monter højre og venstre benstøtte forrest på hovedstellet ved at sætte dem på de to dertil beregnede bolte og dreje dem indad, indtil de falder på plads. **Trin 3. Justering af fodplader** Justér hhv. højre og venstre fodplade ved at tilspænde skruen, der er anbragt på bunden af fodpladerne, vha. den medfølgende nøgle. Justér dernæst benstøtternes hældningsvinkel i forhold til underlaget. Benstøtterne skal justeres, så hoftevinklen mellem overkroppen og lårene udgør ca. 90° (og brugeren dermed ikke har unormalt sammenkrøbne ben i siddestillingen). **Trin 4. Justering af anti-tip-hjul** For at justere anti-tip-hjulene, der er monteret bakerst på kørestolen, skal du frigøre låsen, skubbe hjulene opad el. nedad, og dernæst vælge den ønskede højde. **Trin 5. Montering af nakkestøtte** Monter en nakkestøtte på kørestolens ryglæn ved at stramme låseknapperne, og dernæst fastgøre hovedpude hertil m. velcrobånd. **Trin 6. Fastgørelse af betrækket** Fastgør betrækket

ved at sætte det på sædet, så velcrobåndene vender nedad. **Trin 7. Montering af tværstabilisering** Monter tværstabiliseringen, der er anbragt bakerst på kørestolens ryglæn, ved at tilspænde fastgørelsesskruen til højre håndtag. **Efter at du har udført ovenstående handlinger, er kørestolen klar til brug.**

## **SAMMENKLAPNING AF KØRESTOLEN**

- Vil fodpladerne og sæt dem i lodret stilling
- Tag betrækket af ved at løsne velcrobåndene.
- Afmonter nakkestøtten og tværstabiliseringen.
- For at sammenklappe kørestolens stel skal du trække sædet opad ved at holde det midtpå forrest og bakerst, så stellet hopper ud af forbindelseselementerne.

## **FUNKTION AF PARKERINGSBREMSSEN**

- For at blokere hjulene skal du skubbe bremsestangen fremad, indtil hjulet er fuldstændigt blokeret (separat for venstre og højre hjul).

## **JUSTERING AF PARKERINGSBREMSSEN**

Korrekt funktion af parkeringsbremsen afhænger af dens justering og indstilling. Bremsehåndtaget skal være indstillet, således at bremsefoden blokerer sikkert hjulet, og bremsestangen ikke møder unormal modstand.

- I tilfælde af en for høj modstand skal du skubbe bremsehåndtaget ubetydeligt fremad ved at løsne låseskruen, der er anbragt på den anden side af bremsen (på kørestolens inderside), og indstille det i en sådan position, at bremsen blokerer hjulet let og u. modstand.
- Hvis bremsefoden ikke er i fuld kontakt m. hjulet og ikke blokerer det tilstrækkeligt, skal du følge ovenstående procedure, men bremsestangen skal skubbes i modsat retning.

## **FUNKTION AF HJÆLPETROMLEBREMSE (TIL LEDSAGEREN)**

- Mhp. at aktivere en nødbremse el. blokere hjulene ved parkering skal du klemme bremsestangen, og for at frigøre bremsen skal du slippe bremsestangen. Ovenstående handlinger skal udføres jævnt m. passende styrke.

## **JUSTERING AF RYGLÆN (AF GASTYPE)**

Trinløs ryglænsjustering op til vandret er mulig takket være vægtstængerne, der er monteret bagerst på ryglænet over kørestolens håndtag.

## **AFMONTERING AF ARMLÆN**

- For at afmontere armlænet skal du dreje monteringsknappen på låsen, der er anbragt forrest på armlænet, og dernæst trække armlænet opad.
- For at genmontere armlænet skal du sætte det ind i monteringshullerne, og dernæst stramme låseknappen.

## **LUFTHJUL**

Kørestolen er udstyret m. 24"drivhjul m. dæk og drejelige 8" PU-forhjul (u. slange). Husk at kontrollere dæktrykket i begge hjul regelmæssigt.

## **JUSTERING TIL FOLK EFTER EN BENAMPUTATION**

**Bemærk!** Ønsker du en professionel justering, skal du henvende dig til Forhandleren el. en anden person, der har den nødvendige viden og de påkrævede kvalifikationer. Hældningsvinklen skal ikke justeres på egen hånd.

- For at justere tyngdepunktet skal du løsne fastgørelsesskruen i hhv. højre og venstre forhjul. Dernæst skal du indstille hældningsvinklen på sædet ved at flytte hjulets fastgørelsesakse opad el. nedad, på samme måde for begge hjul.

## **SIKKERHEDSBÆLTE TIL BRUGEREN**

Et sikkerhedsbælte, der medfølger i en standardlevering, er beregnet til beskyttelse af overkroppen i tilfælde af, at brugeren skrider frem i stolen

el. ikke er i stand til selvstændigt at opretholde den korrekte kropsholdning. Bæltet spændes fast m. et spænde.

#### 4. Teknisk specifikation

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Totalbredde                          | 67 / 70 / 74 cm                    |
| Indvendig bredde                     | 43 / 46 / 50 cm                    |
| Totaldybde                           | 117 cm                             |
| Sædehøjde fra underlaget             | 46 cm (48 cm)                      |
| Totalhøjde                           | 124 cm (91 cm)                     |
| Sædedimensioner                      | 42/45/49 cm x 40 cm                |
| Vægt                                 | 19,3/20,3/21,8 kg                  |
| Maks. belastning                     | 100 kg<br>(120 kg størrelse 50 cm) |
| Dimensioner i sammenklappet tilstand | 33 cm                              |
| Stelfarve                            | sølv                               |

#### 5. Bemærkning og anvisninger

**Timago International Group frasiger sig ethvert ansvar for uhensigtsmæssig anvendelse af kørestolen, manglende overholdelse af sikkerhedsreglerne og anvendelse af kørestolen i strid med formålet.**

#### 6. Rengøring og vedligeholdelse

Kørestolens elementer skal vedligeholdes regelmæssigt:

- Betrækket og puden kan rengøres i koldt vand m. en fugtet (ikke våd) klud, uden brug af rengøringsmidler. Vanskeligere pletter skal rengøres m. en svamp. Udvis forsigtighed ved vedligeholdelse af betrækket, så det ikke er vædet for meget. Betrækket tørres væk fra varmekilder.
- Plastdele skal rengøres m. en fugtet klud, evt. m. anvendelse rengøringsmidler til plast. Følg anvisningerne fra Producenten på

området og sikkerhedsreglerne for brug af rengøringsmidler.

## 7. Opbevarings- og transportbetingelser

Produktet bør ikke udsættes for direkte sollys, vand og fugt.

## 8. Garantioplysninger

Produktet er omfattet af garantien. Garantivilkårene er beskrevet i garantikortet, som du fik udleveret. Gem købsbeviset (kvittering el. faktura) til garantiformål.

## 9. Mærkning

|                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                     |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    | Referencenummer                                                                                           |    | Producent                         |
|   | Partinummer                                                                                               |   | Produktionsdato                   |
|  | Serienummer                                                                                               |  | Medicinsk udstyr                  |
|  | Bemærk                                                                                                    |  | Læs brugsanvisningen nøje igennem |
|  | Producenten har vurderet produktets forenelighed m. de væsentlige krav, der stilles til medicinsk udstyr. |                                                                                     |                                   |

Kontakt vores forhandlere for at gøre dig bekendt med hele vores sortiment.

For nærmere oplysninger se hjemmesiden **[www.timago.com](http://www.timago.com)**

Tak fordi du har valgt Timago produktet!



Timago International Group

Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa *[ApS og K/S]*

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Polska

Tlf.: +48 33 499 50 00

Telefax: +48 33 499 50 11

E-mail: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)



Udgave III, ajourføringsdato: 30.04.2021