

DÜNE

Användarhandbok



Tack för ditt förtroende!

Korrekt användning av denna produkt är en grundläggande förutsättning för att säkerställa säkerhet, komfort och hållbarhet.


Läs igenom denna bruksanvisning noggrant före användning och följ de punkter som är markerade med ★.

Innehåll


1. Anvisningar för öppning och vikning
2. Beskrivning av tillbehör
3. Produktens standardkonfiguration
4. Kontroll och underhåll före körning
5. Anvisningar för batteriet
6. Anvisningar för säker körning
7. Avhjälpande av fel
8. Viktiga anvisningar

Anvisningar för öppning och hopfällning


Öppning:

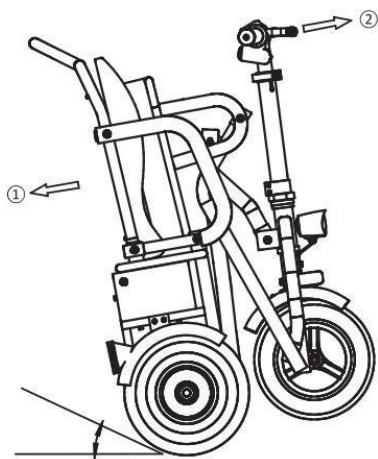

- ① Luta fordonet något bakåt
- ② Tryck styret framåt (i riktningen som på bilden)

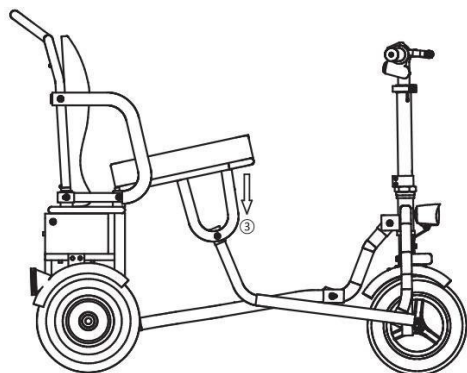


- ③ Tryck ner sittdynan (som på bilden).

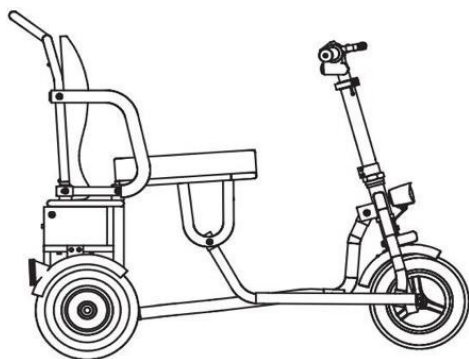


Avsluta öppningen


Vikning:

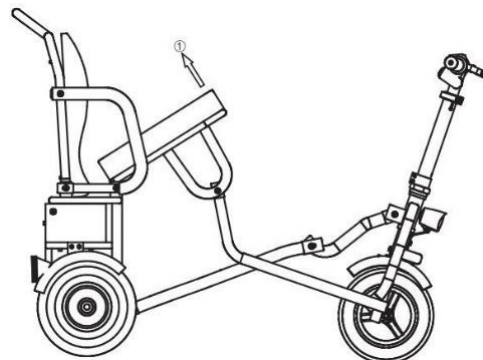

- ① Lyft upp sittdynan (som på bilden)

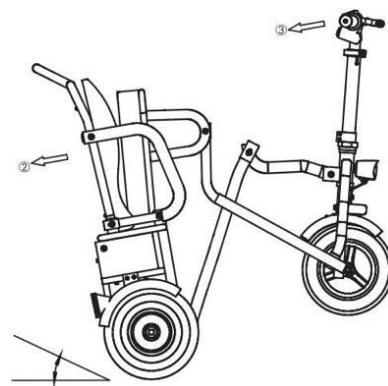

- ② Luta fordonet något bakåt
- ③ Dra styrstången bakåt

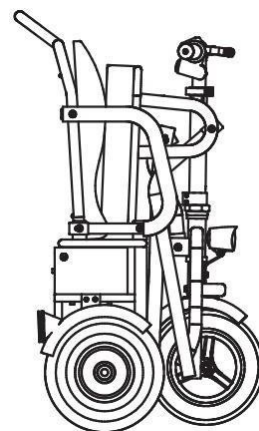

Avsluta vikningsprocessen

Beskrivning av tillbehören

Multifunktionsbrytare

Slå på strålkastaren med pilen uppåt "ON" och stäng av den med pilen nedåt "OFF".

"R" är backväxeln, "D" är framväxeln


Halknappen är placerad under framåt- och backväxelknapparna:



Litiumbatteri

1. Använd nyckeln på batterilådan för att ta ut den om det behövs.
2. Med "OFF" stängs fordonet av.
3. Med "ON" startas fordonet.

Sätt ner handtaget på batteriet. Nu syns laddningsuttaket.

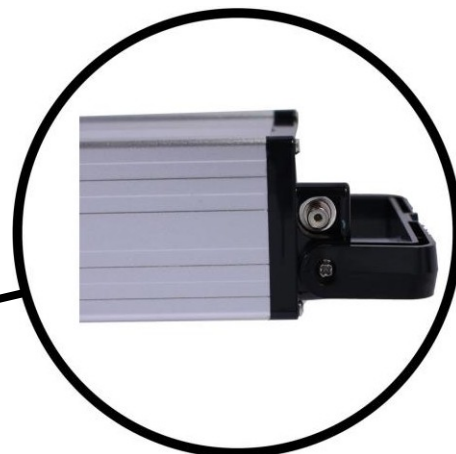

Bakifrån

För att ta ut batteriet måste nyckeln på batterilåset ställas på "Lock"
. Batteriet kan nu skjutas ut och t.ex. laddas externt.




Batteriet har ett handtag för transport, bakom vilket, som redan nämnts, även laddningsuttaget.

Tack vare den elektromagnetiska bromsen kan fordonet bromsa automatiskt när du släpper gaspedalen under körning.

Bromsen ser också till att fordonet stannar kvar i en sluttning.

Om fordonet måste skjutas, tryck den röda handtaget på drivaggregatet framåt. När du kör normalt måste den elektromagnetiska bromsen återgå till sitt ursprungliga läge och det röda handtaget måste dras tillbaka igen.

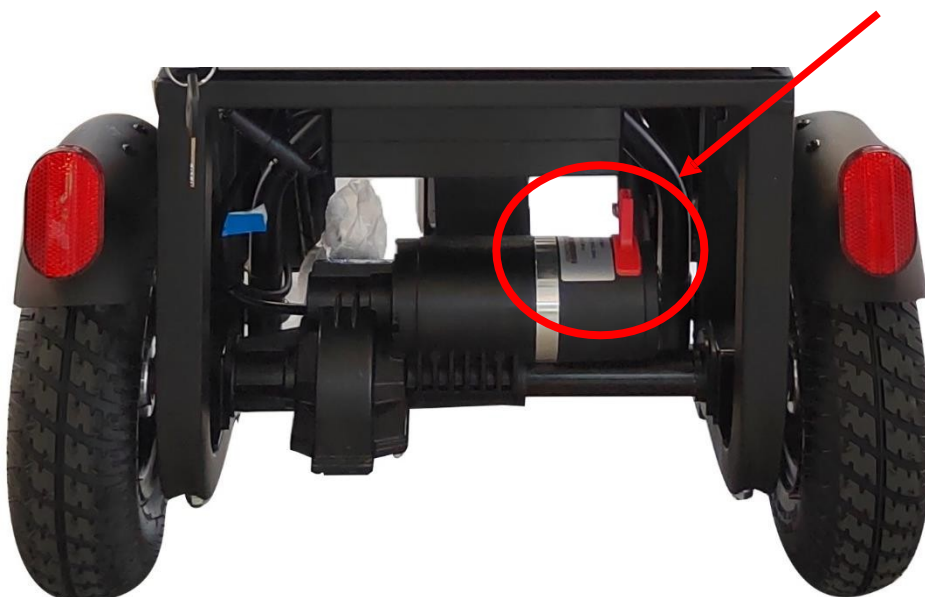

Öppen storlek	970*490*860 mm	Broms	Elektromagnetisk broms
Storlek i hopfällt tillstånd	420*490*860 mm	Maximal lastvikt	≤120 kg
Totalvikt	27 kg (Inklusive litiumbatteri)	Motor	24 V 250 W (motor på bakaxeln)
Ram	Aluminiumlegering	Litiumbatteri	24 V 12 AH (Avtagbar batterilåda)
Framhjul	8 tum helgummidäck	Framåt hastighet	≤ 6 km/h
Bakhjul	9,5 tum helgummidäck	Bakåtkörningshastighet	≤6 km/h
Upphängning	Framhjulsstötdämpare	Max. körsträcka	≤15 km

Produktstandardkonfiguration

Bärbar elektrisk hopfällbar rullator	Monteringsverktyg	Laddare	Bruksanvisning
1	1 st	1 st	1 st

Ovanstående uppgifter är endast avsedda som referens. De tekniska specifikationerna för denna produktserie kan ändras utan föregående meddelande. I praktiken kan uppgifter som laddningsprocess och räckvidd variera beroende på olika vägförhållanden, klimat och körhastighet.

Kontroll och underhåll före körning

För att säkerställa att detta bärbara, elektriska, hopfällbara fordon underlättar din vardag bör du kontrollera och underhålla produkten enligt följande krav före användning.

1. Kontrollera att batteriet är fulladdat och se till att alla kablar är korrekt anslutna.
2. Kontrollera att bromssystemet är tillförlitligt och effektivt.
3. Kontrollera att däcktrycket är normalt.
4. Innan du börjar cykla bör du justera framhjulet korrekt och dra åt fästgreppet.
5. Styret och rörelseutrymmet för de enskilda delarna bör kontrolleras och smörjas vid behov.

Instruktioner för batteriet

- ★ Felaktig användning minskar batteriets livslängd och kan leda till kapacitetsförlust, brand eller till och med explosioner. Läs följande anvisningar noggrant:
- ★ Batteriet får inte demonteras eller krossas. Inuti batteripaketet finns delar med skyddande omkopplingsfunktion. Demontering skadar dessa delar.
- ★ Kortslutning mellan batteriets plus- och minuspol är strängt förbjudet. Kortslutning kan leda till upphettning av batteriet, brand och andra faror.
- ★ Undvik att batteriet blir varmt eller bränner sig. Om batteriet blir varmt eller brinner kan isoleringen smälta, vilket kan leda till brand, explosion och andra faror för batteriet.
- ★ Placera inte batteriet i vatten eller i en fuktig miljö. Vatten på batteriet kan lätt orsaka kortslutning på skyddskortet, vilket leder till oönskad kortslutningsuppvärmning och andra faror.
- ★ Ladda endast batteriet med en laddare som är avsedd för batteriet. Annars kan det uppstå onormala kemiska reaktioner i batteriet, vilket kan leda till uppvärmning av batteriet, brand och andra faror.
- ★ Det är strängt förbjudet att slå på batteriet med en hammare eller andra hårda föremål eller att skära i batteriet med vassa verktyg. Skador på batteriet kan leda till kortslutning och därmed brand och andra faror.
- ★ Om batteriet skadas eller läcker och det läckande materialet kommer i kontakt med ögonen, gnugga inte med händerna utan skölj omedelbart med rent vatten och uppsök läkare så snart som möjligt.
- ★ Undvik att byta ut litiumjonbatterier från olika tillverkare eller med olika kapacitet. Om så är fallet kan det leda till att batteriet blir varmt vid laddning och urladdning, brand och andra faror.
- ★ Batteriet måste laddas fullständigt inom tre dagar efter användning.
Om batteripaketet inte används under en längre tid måste det laddas fullständigt varannan månad, eftersom batteriet annars lätt kan skadas av en djupurladdning.
- ★ Förläng inte laddningen (vanligtvis 10 timmar), eftersom det kan leda till överhettning. Om batteriet överskrider den angivna tiden och inte är fulladdat, avsluta laddningen.
- ★ Håll batteriet borta från barn för att undvika faror.
- ★ Förvara inte batteriet i en mikrovågsugn eller högtrycksmiljö för att undvika faror.

Anvisningar för säker körning

För att du ska kunna använda detta bärbara, elektriskt hopfällbara fordon på ett säkert sätt bör du absolut följa följande villkor för korrekt användning:

- ★ Innan du kör för första gången bör du göra några övningskörningar på öppen mark. Delta inte i trafiken förrän du behärskar acceleration, inbromsning, bromsning, tutande och andra funktioner perfekt.
- ★ Följ trafikreglerna och håll en måttlig hastighet. Att köra med högsta hastighet ökar inte bara strömförbrukningen och minskar räckvidden, utan minskar också säkerheten.
- ★ När du kör i trånga utrymmen, till exempel i en stormarknad, är det viktigt att hålla låg hastighet för att kunna kontrollera bromssträckan. Vid svängar får hastigheten inte överstiga 2 km/h.
- ★ På regniga dagar bör fordonet inte användas och man bör undvika att köra genom vatten så långt det är möjligt. Vid körning genom vatten får vattendjupet inte överstiga 20 mm och hastigheten får inte överstiga 1 km/h.
- ★ Tändningsnyckeln på strömbrytaren på baksidan av batteriet ska stängas och dras ut för att förhindra att andra personer eller barn använder fordonet på fel sätt.

Avhjälpan av fel

Felfunktioner	Orsak	Lösning
Växelspaken fungerar inte eller maximal hastighet minskar avsevärt	1. Batterikabeln sitter löst 2. Låg batterispänning 3. Fjäderbrott på växelspaken	1. Dra åt batterikabeln 2. Ladda batteriet helt 3. Byt ut fjädern eller växlingsspaken
Laddaren fungerar inte	1. Strömkabeln är defekt eller kontakten är urkopplad 2. Säkring i laddaren 3. Batteripolen är fränkopplad	1. Reparera strömkabeln eller skruva fast laddningsuttaket. 2. Byt ut säkringen med samma modell. 3. Anslut alla anslutningar.
Laddningen sker regelbundet, men körprestandan är otillräcklig	1. Bromsskivorna är för hårt justerade 2. För lång körning i hög växel eller uppför, ogynnsamma vindförhållanden, för frekvent bromsning 3. Åldrande eller skador på batteriet	1. Justera bromskabelns spänning korrekt 2. Undvik långa körningar med hög hastighet och frekvent bromsning. Vid uppförsbackar och motvind är det normalt att strömförbrukningen ökar. 3. Byt ut eller reparera batterierna
Drivmotorn fungerar inte korrekt	1. Lös eller lossad anslutning av batteri, motor, styrning och andra kablar 2. Den genomsnittliga körhastigheten kan inte hållas, styrenheten är skadad av smuts	1. Kontrollera batteriet, motorn, styrenheten och andra kablar och anslut dem ordentligt. 2. Håll växelspaken ren för att undvika smuts.

★ Batterier, laddare, motorer, styrsystem och växelspakar måste repareras av professionella tekniker eller underhållsverkstäder efter försäljningen.

★ Ovanstående data är endast avsedda som referens. Ändringar av de tekniska specifikationerna för denna produktserie kan göras utan föregående meddelande.

★ Vid faktisk användning kan avvikelser uppstå på grund av olika vägförhållanden, klimat, körhastighet, laddningsprocess och körprestanda.

Viktiga anvisningar

★ När du startar fordonet, gasa långsamt så att framhjulet inte sladdar.

★ När du kör i en uppförsbacke, luta dig framåt för att hålla tyngdpunkten stabil och förhindra att fordonet välter i backen.

★ När fordonet svänger, sänk hastigheten och undvik att välta.

★ Vid normal användning av fordonet, kontrollera regelbundet att skruvarna inte sitter för löst eller har lossnat.

★ Kör så lite som möjligt när vägen är hal på regniga dagar.

De tekniska uppgifterna baseras enbart på aktuella produkter; ändringar utan föregående meddelande

Tillverkare:

Tianjin Promoting Medical Technology Co.,Ltd

Xiyingmen Street, Xiqing District,

Tianjin, Kina

Distributör:



aktiv Deutschland Elektromobile GmbH & Co. KG

Gnutzer Str. 14

D-24589 Nortorf

Tel.: +49(0)4392 / 913090

Fax: +49(0)4392 / 9130910

E-post: info@aktivdeutschland.de

Internet: www.aktivdeutschland.de