

BRUGSANVISNING

Badekørestol til transportformål

Produktkode: FS 7962L




1. Udførelse

En badekørestol er udført i et aluminiumsstel. Udstyret m. et ryglæn og et sæde m. U-formet hygiejneudskæring lavet af holdbart PVC, vipbare armlæn, sammenklappelig benstøtte, fulde 6" baghjul og drejelige 4" forhjul m. bremse.

Kørestolens elementer:

- a. ryglæn
- b. armlæn
- c. sæde
- d. låsestift
- e. monteringskrue
- f. benstøtter
- g. bremse

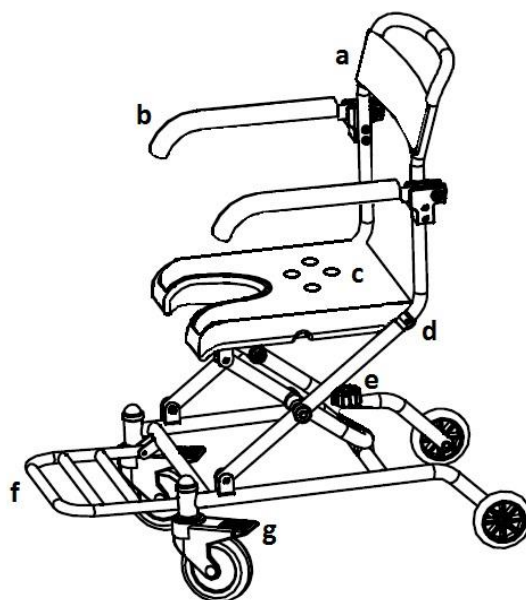

2. Anvendelse

En badekørestol er et hjælpemiddel, der gør det lettere for brugeren at udføre de daglige hygiejnerutiner. Den anbefales til personer m. nedsat fysisk evne, m. handicap og bevægelsesbegrænsninger. Den kan kun bruges m. ledsagerens hjælp. Den er designet til indendørs brug på hospitalet el. under hjemlige forhold.

3. Montering

Trin 1. Start med at klappe benstøtten op.

Trin 2. Løft sædet opad og lås det på bagstellets fodstykke ved at stramme låseskruen.

Trin 3. Før ryglænsrørene ind i begge dele af hovedstellet, og dernæst lås ryglænet m. låsestifterne.

Trin 4. Sænk armlænene.

Kørestolen er klar til brug.

4. Teknisk specifikation

Totalbredde	54 cm
Indvendig bredde	74 cm
Totaldybde	47 cm
Sædehøjde fra underlaget	88 cm
Sædedimensioner	40 x 37,5 cm
Vægt	6 kg
Maks. belastning	100

5. Bemærkninger og anvisninger

Timago International Group frasiger sig ethvert ansvar for uhensigtsmæssig anvendelse af kørestolen, manglende overholdelse af sikkerhedsreglerne og anvendelse af kørestolen i strid med formålet.

6. Vedligeholdelse

Kørestolens elementer skal vedligeholdes regelmæssigt:

- Kørestolen kan rengøres i koldt el. varmt vand m. en fugtet klud. Vanskeligere pletter skal rengøres m. en svamp. Tørres væk fra varmekilder.

7. Opbevarings- og transportbetingelser

Produktet bør ikke udsættes for direkte sollys, vand og fugt.

8. Garantioplysninger

Produktet er omfattet af garantien. Garantivilkårene er beskrevet i garantikortet, som du fik udleveret. Gem købsbeviset (kvittering el. faktura) til garantiformål.

9. Mærkning

	Referencenummer		Producent
	Partinummer		Produktionsdato
	Serienummer		Medicinsk udstyr
	Bemærk		Læs brugsanvisningen nøje igennem
	Producenten har vurderet produktets forenelighed m. de væsentlige krav, der stilles til medicinsk udstyr.		

Kontakt vores forhandlere for at gøre dig bekendt med hele vores sortiment.

For nærmere oplysninger se hjemmesiden **www.timago.com**.



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa *[ApS og K/S]*
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polska

Tlf.: +48 33 499 50 00
Telefax: +48 33 499 50 11
E-mail: info@timago.com



04/2021(II)