



Før produktet tages i brug, skal denne brugsanvisning læses omhyggeligt. Instruksen indeholder nødvendige oplysninger for sikker og korrekt anvendelse af produktet, herunder vedligeholdelse og rengøring. Forkert anvendelse af produktet i strid med denne vejledning kan medføre alvorlige komplikationer. Brugsanvisningen skal opbevares et let tilgængeligt sted.

BRUGSANVISNING

BETRÆK
VANDTÆT – ÅNDBART

PRODUKTETS FORMÅL

Det vandtætte, åndbare madrasbetræk beskytter madrassen mod indtrængning af kropsvæsker, snavs, virus, bakterier m.m., samtidig med at det tillader dampgennemtrængning. Det anvendes under behandling, rekonvalescens eller rehabilitering samt til permanent immobiliserede patienter.



KONTRAINDIKATIONER

Brug ikke betrækket, hvis det ikke passer til madrassens størrelse. Anvend ikke produktet til andet end dets tilsigtede formål. Anvend ikke produktet i nærheden af åben ild eller på varme overflader. Dette kan medføre alvorlig skade på brugeren og helbredsmæssige konsekvenser.



SIKKERHEDSREGLER

Huden i kontakt med betrækket skal være ren. Hudens tilstand skal kontrolleres regelmæssigt. Brug ikke skarpe genstande eller udstyr, der kan beskadige betrækket Sørg for god hygiejne: rengør eller vask betrækket regelmæssigt.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Betrækket kan vaskes i mildt vaskemiddel ved temperatur op til 90°C Betrækket kan steriliseres ved temperatur op til 120°C Desinfektion kan foretages med alkoholopløsning op til 60% Brug ikke blegemidler eller kemikalier Må ikke kemisk renses. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder klor Tør betrækket fladt Undgå kraftig tilsmudsning af produktet

UDPAKNING OG MONTERING

Åbn pakken forsigtigt ved modtagelsen for ikke at beskadige betrækket. Betrækket skal passe til madrassen for at fungere korrekt.

REKLAMATIONS BETINGELSER:

Kun skjulte fejl, der skyldes producenten, er omfattet af reklamationsretten. Det produkt, der reklameres over, skal opfylde de grundlæggende hygiejnekrav, som gælder for salgsvare.

FØLGENDE ER IKKE OMFATTET AF REKLAMATIONSRET TEN:

Mekaniske skader (slid, rifter) Skader forårsaget af almindelig brug Skader som følge af forkert størrelse på madras i forhold til seng Skader forårsaget af manglende overholdelse af brug-, rengørings- eller vedligeholdelsesvejledningen. Misfarvning af betrækket Brugerkomfort

BORTSKAFFELSE

Når produktet ikke længere er egnet til brug, skal det bortskaffes. Rengør produktet inden bortskaffelse for at eliminere risikoen for kontaminering.



Hvis der opstår nogen bivirkninger ved brug af produktet, skal dette rapporteres til producenten og til den kompetente myndighed i det medlemsland, hvor brugeren eller patienten er bosiddende.

Erklæring om overensstemmelse svurdering af produktet med EU-lovgivnings krav CE	Producent 	Læs brugsanvisningen 	Advarsel!
Medicinsk udstyr MD	Produktionsbatch nummer LOT	Unik enhedsidentifikation (UDI) UDI	Anvendes inden
Tilladt opbevaringstemperatur 5°C - 35°C 	Opbevares tørt 	Beskyt mod sollys 	Emballagen kan genbruges
Emballagen skal bortskaffes i affaldsbeholderen 			

PRODUCENT



MED-MAT Przemysław Cezar
ul. Kochcicka 16/1
42-700 Lubliniec

Korrespondanceadresse
ul. Opolska 77
47-300 Krapkowice

tel: 507 470 141
e-mail: biuro@med-mat.pl



Producenten har et certificeret kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med ISO 13485.

Sidste opdatering af instruktion
03.2024

Instruktionssymbol
01/2023

STØRRELSE

Længde i cm	
Bredde i cm	
Højde i cm	



BASIC UDI-DI 5906142341MATTRESSCOVER2Z

