

BRUKSANVISNING

3-i-1 dusch- och toalettstol med transportfunktion

Produktkod: SANI-TIM




1. Egenskaper

Dusch- och toalettstolen är tillverkad av en pulverlackerad aluminiumram. Den har uppfällbara armstöd som gör det lättare för personer med nedsatt rörlighet att sätta sig och resa sig. Stolen är utrustad med ett PU-säte med kilformad insats, främre svängbara 5"-hjul med bromsar, bakre 24" massiva hjul med snabbkopplingsfunktion och avtagbara fotstöd. Stolen har dessutom ett handtag för medhjälpare och en sanitetsbehållare. Konstruktionen gör det möjligt att placera stolen över en toalettstol.

Setet innehåller: Stol – höger och vänster ram med hjul, ryggstöd med armstöd, säte med kil, höger och vänster fotstöd, sanitetsbehållare med lock, bakhjul 24" (2 st), övre och nedre främre anslutningsrör, bakre anslutningsblock, skruvar med skyddshattar (6 st), låsknappar (2 st) och insexnyckel.

Delar av stolen:

- A. Handtag
- B. Ryggstöd
- C. Armstöd
- D. Säte
- E. Sanitetsbehållare
- F. Fotstöd
- G. Lås för uppfällbara armstöd
- H. Parkeringsbroms
- I. 5" hjul med broms
- J. Bakre 24" hjul med drivring
- K. Snabbkopplingsmekanism

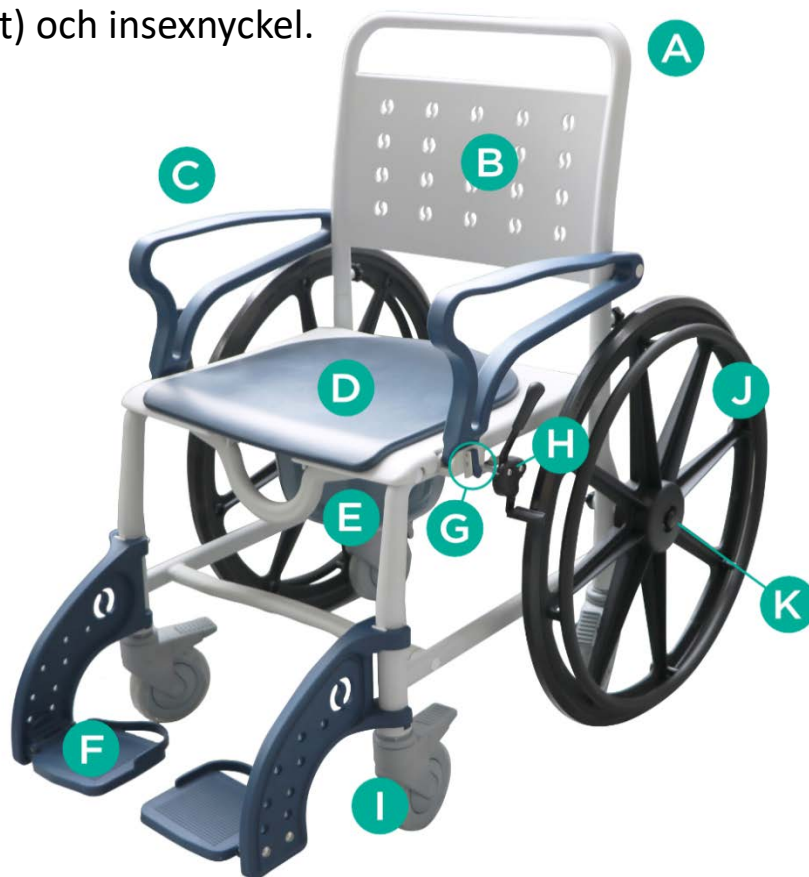

2. Användning

Dusch- och toalettstolar är avsedda för personer som har svårt att förflytta sig på egen hand, samt för patienter med funktionsnedsättningar eller nedsatt rörlighet. Stolen är endast avsedd för inomhusbruk. Den fungerar både som dusch- och toalettstol tack vare den fuktresistenta aluminiumramen och sanitetsbehållaren under sätet. Den underlättar daglig hygien. Stolen rekommenderas särskilt för

personer med nedsatt rörlighet orsakad av förlamning, övervikt eller undervikt, extremitetsdeformiteter, degenerativa sjukdomar, ledsjukdomar, skador eller amputationer samt hjärt- eller cirkulationssjukdomar.

3. Montering


1. För att förhindra att ramen rör sig under montering, lås bromsarna genom att trycka ned bromshandtagen.
2. Anslut höger och vänster ram med rören med hjälp av skruvar och insexnyckel (bild 1). Sätt sedan skyddshattarna på monteringshålén (bild 2).



3. Montera sätet på ovansidan av ramen. Skjut in sanitetsbehållaren under sätet bakifrån.
4. **Montera bakhjulen:** Sätt in snabbkopplingsmekanismen (K) i öppningen för bakhjulet. Se till att den mellersta ringen i öppningen är centrerad och inte täcker öppningen (bild 3 och 4). För in mekanismen i öppningen samtidigt som du trycker på den svarta locket (bild 5). När mekanismen sitter på hjulet, sätt in det i öppningen på stolens bakre ram medan du åter trycker på det svarta locket. En korrekt monterad mekanism ska gå igenom öppningen på andra sidan av ramröret (bild 6). Upprepa på andra sidan.



5

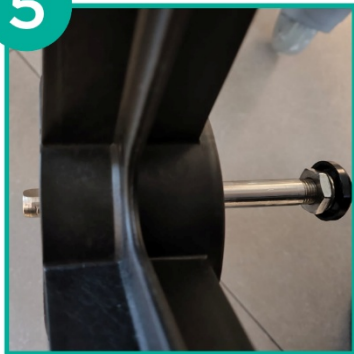

6



5. Sätt ryggstödsrören på stolens ram och säkra dem med låsknapparna. Tryck på armstödet lås och sänk armstöden tills de låses på plats.
6. Fäst fotstöden på de främre ramdelarna (bild 2).



HANTERING AV STOLEN

- Kontrollera att parkeringsbromsar, konstruktion och hjul är i gott skick. Kontrollera att alla delar är korrekt monterade och justerade.
- Kontrollera innan användning att stolens bredd passar användaren, eftersom bredden inte kan justeras.
- Stolen är avsedd för korta avstånd och endast för inomhusbruk. Den har ingen stötdämpning, därför rekommenderas inte långvarig användning.

OBS! Använd inte stolen om fel eller skador upptäcks.

UPPFÄLLBARA ARMSTÖD

- Tryck på låset (G) under armstödet och lyft försiktigt upp armstödet.
- Använd inte armstödet som stöd vid uppresning. Be om hjälp vid behov.

SNABBKOPPLINGSFUNKTION FÖR BAKHJUL

- De bakre 24" hjulen kan enkelt tas bort tack vare snabbkopplingsfunktionen, vilket gör att stolen kan användas som dusch- eller toalettstol. För att ta bort bakhjulen, tryck på det svarta locket på snabbkopplingsmekanismen (K) och ta bort hjulet.

- För att montera tillbaka, tryck på det svarta locket och sätt tillbaka mekanismen i öppningen på den bakre ramen.

BROMSAR

- För att låsa de främre hjulen, tryck ned pedalerna med foten. För att låsa upp hjulen, lyft upp pedalen.
- För att låsa de bakre hjulen, dra parkeringsbromshandtaget framåt. För att låsa upp hjulen, dra handtaget i motsatt riktning.

ATT SÄTTA SIG I STOLEN

- Det är viktigt att bromsarna är låsta när användaren sätter sig, reser sig eller ändrar position.
- När användaren förflyttas ska stolen placeras så nära som möjligt intill sängen eller sätet. Stolen bör röra vid sängen eller stolen som används. Om användaren inte kan flytta sig själv, hjälp till med förflyttningen.
- Användaren bör sitta så långt in mot mitten av sätet som möjligt för att undvika instabilitet.
- Kliv inte på fotstödet vid i- eller urstigning – det kan orsaka skador.

4. Tekniska data

Total bredd	68,5 cm
Invändig bredd	50 cm
Total djup	104 cm
Säteshöjd från golvet	52 cm
Total höjd	100 cm*
Sätesmått	50 x 45 cm
Vikt	22 kg
Maximal belastning	120 kg
Ramfärg	vit

* höjd mätt med monterade 24" hjul

5. Anmärkningar

Timago International Group ansvarar inte för felaktig användning av produkten eller underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifterna.

6. Rengöring och underhåll

Utför regelbundet underhåll av stolens delar:

- Sätet kan rengöras med en fuktig trasa och kallt eller varmt vatten utan rengöringsmedel. Svåra fläckar kan tas bort med en svamp.
- Plastdelar bör rengöras med en fuktig trasa och lämpliga rengöringsmedel för plast. Följ alltid tillverkarens instruktioner och säkerhetsåtgärder.
- Töm och desinficera toalettbehållaren och sitsen efter varje användning. Använd rengöringsmedel enligt tillverkarens rekommendationer.

7. Förvarings- och transportförhållanden

Produkten får inte utsättas för direkt solljus, vatten eller fukt.

8. Garantiinformation

Alla produkter som distribueras av vårt företag omfattas av garanti. Garantivillkoren finns i garantikortet på vår webbplats. Kontakta återförsäljaren där du köpte produkten. Tänk på att för garantiändamål ska inköpsbeviset (kvitto eller faktura) sparas.

9. Etiketter

	Referensnummer		Tillverkare
	Partinummer		UDI-kod
	Serienummer		Medicinteknisk produkt
	Obs!		Vänligen läs instruktionen
	Tillverkaren har kontrollerat att kraven för medicintekniska produkter uppfylls.		

Vårt kompletta sortiment finns tillgängligt via våra distributörer. Läs mer på: **www.timago.com**. Tack för att du valt Timago!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



10/2025 (I)