

BRUGSANVISNING

Trappestøtte med fire ben

Produktkode: DuoStep



1. Egenskaber

Trappestøtten er fremstillet af slidstærkt, pulverlakeret aluminium. Den har højdejusterbare ben og skumgreb. Trappestøttens konstruktion gør det muligt at bruge den både som støtte ved trappegang og til at rejse sig fra sengen.

Sættet indeholder: overdel med håndtag, underdel, ben med spidser (2 stk.).

Kæppens dele:

- A. Håndtag
- B. Støttehåndtag
- C. Øvre ramme
- D. Nedre ramme
- E. Højdejustering
- F. Ben med skridsikre ender


2. Anvendelse

Trappestøtten er designet til at yde støtte ved gang i trapper eller ved opståen fra sengen. Støtten anbefales til personer med nedsat mobilitet, der hindrer dem i at udføre daglige aktiviteter uden hjælp. Produktet er beregnet til brug både under pleje på medicinske institutioner og i hjemmet.

3. Samling

Trin 1. Saml den øverste ramme (C) med den nederste ramme (D) ved hjælp af låsestifterne.

Trin 2. Sæt benene (F) ind i åbningerne på den nederste ramme (D). Vælg den ønskede højde, og lås dem fast med stifter.

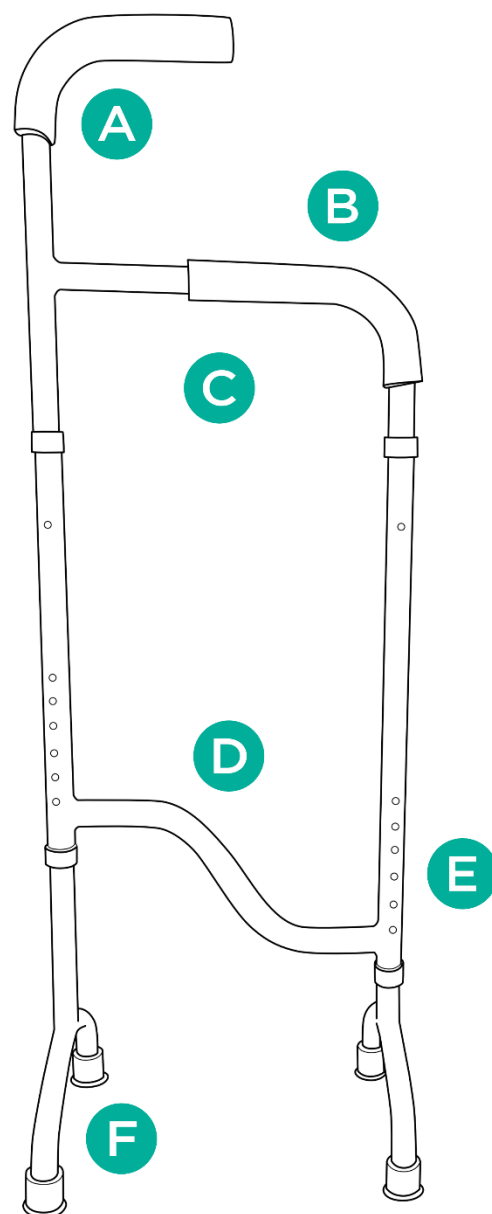

HØJDEJUSTERING AF BENENE

- For at justere benene skal du trykke på låsestifterne på benene og vælge den passende højde.
- Hvis stokken bruges på trapper, skal du vælge højden i henhold til trappetrinets højde (det ene ben skal placeres et trin højere end det andet).
- Hvis stokken bruges som støtte til at rejse sig fra sengen, skal benene justeres, så begge er i samme højde.

4. Tekniske data

| | |
|------------------------------|------------|
| Samlet højde for venstre ben | 88–102 cm |
| Samlet højde for højre ben | 102–116 cm |
| Håndtagets højde fra gulvet* | 83,5 cm |
| Vægt | 1,00 kg |
| Maks. vægtpacitet | 136 kg |

*målt når begge ben er i samme højde

5. Bemærkninger

Timago International Group påtager sig ikke ansvaret for forkert brug af produktet, manglende overholdelse af sikkerhedsbestemmelser og misbrug.

6. Vedligeholdelse

Rengør stellet regelmæssigt med en fugtig klud uden brug af rengøringsmidler. Tør grundigt af. Svære pletter kan fjernes med en svamp.

7. Opbevarings- og transportbetingelser

Produktet må ikke udsættes for direkte sollys, vand eller fugt.










8. Garantiinformation

Alle produkter, der distribueres af vores virksomhed, er dækket af en garanti, hvis betingelser er beskrevet i garantikortet, som findes på vores hjemmeside. Kontakt venligst forhandleren, hvor du har købt produktet. Husk at opbevare købsbeviset (kvittering eller faktura) for at kunne gøre brug af garantien.

9. Hændelser med medicinsk udstyr

Enhver alvorlig hændelse, der involverer et medicinsk udstyr, skal rapporteres til producenten og til den kompetente myndighed i den medlemsstat i Den Europæiske Union, hvor brugeren eller patienten har bopæl.

10. Mærkater

| | | | |
|---|---|---|----------------------------------|
|  | Referencenummer |  | Producent |
|  | Batchnummer |  | UDI-kode |
|  | Serienummer |  | Medicinsk udstyr |
|  | Bemærk |  | Læs venligst brugsanvisningen |
|  | Produktet opfylder Den Europæiske Unions lovgivningsmæssige krav til medicinsk udstyr (MDR 2017/745). | | |

Vores komplette sortiment af produkter fås hos vores distributører. Læs mere på: www.timago.com. Tak fordi du valgte Timago!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



04/2026(I)