



FRODO

RULLSTOL I ALUMINIUM

BRUKSANVISNING

RULLSTOLENS DELAR



- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Handtag | 11. 8" svängbart, massivt framhjul med tyngdpunktsjustering |
| 2. Broms för ledsagare | 12. Justering av fotstöds längd |
| 3. Justeringsvred för handtag | 13. Ryggstödsficka för tillhörigheter |
| 4. Klämma för fällning av ryggstöd | 14. Justerbart armstöd |
| 5. Justerbart ryggstöd | 15. 24" massivt bakhjul med drivring |
| 6. Sits* med säkerhetsbälte | 16. Knapp för snabbkopplingsfunktion |
| 7. Parkeringsbroms | 17. Tyngdpunktsjustering (alla riktningar) |
| 8. Fotstödsreglage | 18. Tippskyddshjul med längdjustering |
| 9. Vadskyddsrem | |
| 10. Fotplatta | |

* finns i storlek 44, 46 och 49 cm

1. Egenskaper

Rullstolen är tillverkad av en lätt aluminiumram med flera justeringsmöjligheter för att motsvara användarens specifika behov:

- a) komplex tyngdpunktsjustering på bakhjulen, som möjliggör justering i alla riktningar (upp/ned/framåt/bakåt).
- b) standard tyngdpunktsjustering/justering av hjulvinkel på framhjulen och snabbkopplingsfunktion på bakhjulen.
- c) Höjdjustering för handtag/armstöd/ryggstöd och längdjustering för tippskyddshjul/fotstöd.

Den är utrustad med parkeringsbromsar, bromsar för ledsagare, säkerhetsbälte, funktion för fällning av ryggstöd och hjul: bak 24" (massiva), fram 8" (massiva, svängbara). Dessutom levereras rullstolen i set med ventilerande nättygsklädsel (med ficka på ryggstödet), avtagbara armstöd med höjdjustering, tippskyddshjul och fotstöd med vadskyddsremmar.

Setet innehåller: rullstolsram med hjul, klädsel med ficka för tillhörigheter, fotstöd med skyddsremmar, tippskyddshjul, armstöd, uppsättning nycklar för montering/demontering.

2. Användning

Rullstolen är avsedd för personer som har problem med att förflytta sig utan hjälp och för patienter med funktionsnedsättningar och nedsatt rörlighet. Denna självdrivna rullstol kan även skjutas av en medföljande person. Tack vare möjligheten att anpassa inställningarna efter användarens individuella behov ger rullstolen bättre kontroll, större stabilitet och en mer dynamisk, aktiv körning i vardagen. Rullstolen är lämplig för användning inomhus och utomhus.

3. Montering

Steg 1. Uppfällning av rullstolen

Placera rullstolen på marken. Fäll upp rullstolen med hjälp av armstöden. Tryck sedan på sidorna av sitsen så att alla delar passar ihop.

Steg 2. Ryggstöd och sits

Lyft ryggstödet uppåt och lås det med ryggstödet klämmor [4] som sitter under handtagen. Fäst klädseln med ficka på rullstolens sits och ryggstöd.

Steg 3. Fotstöd

Fäst fotstödet på ramens utsida. Vrid sedan fotstödet inåt (tryck samtidigt på fotstödsreglaget) tills det låses.

Steg 4. Armstöd

Armstöden kan tas bort eller höjdjusteras. För att höja/sänka armstödet, tryck på knappen som sitter på ramen, under armstödet.

Steg 5. Höjdjustering av fotstöd och handtag.

- Justera fotstöden med hjälp av uppsättningen monteringsnycklar. För att justera, skruva loss skruven [12] som sitter på fotstödet ram. Tillräckligt utrymme bör lämnas mellan fotplattorna och marken eftersom för lågt inställda fotplattor kan orsaka svårigheter vid körning uppför backar och över trottoarkanter. Justera fotplattorna så att vinkeln mellan bålen och låren är 90° (optimal sittställning för användaren).
- Handtagens höjd kan justeras efter den medföljande personens behov. För att justera höjden, skruva loss monteringsvredet [3] som sitter under bromsarna för ledsagare [2]. Välj önskad höjd och dra åt vredet. Kontrollera att båda handtagen är på samma höjd.

FÄLLNING OCH FUNKTION FÖR FÄLLNING AV RYGGSTÖD

- Sväng undan fotplattorna och ställ dem i vertikalt läge eller ta bort dem. Lyft sitsen uppåt genom att greppa tyghandtaget på sitsen. Tryck rullstolen inåt från båda sidor för att säkerställa korrekt fällning. Lossa sits- och ryggstödsklädseln med väska vid behov.
- För att fälla ryggstödet, tryck samtidigt på låselementen som sitter under handtagen på ryggstödet baksida och dra ryggstödet nedåt.

HÖJDJUSTERING AV RYGGSTÖD OCH HANDTAG

Obs! Ryggstödet kan endast justeras efter att handtagens höjd har höjts/sänkts.

Ryggstödet kan justeras efter användarens behov. För att justera ryggstödet, ta först bort klädseln. Lossa sedan det övre kardborrebandet på rullstolens baksida och flytta ryggstödet högre. Fäst därefter kardborrebandet och montera klädseln igen.

PARKERINGSBROMS

För att låsa hjulen, tryck spaken framåt tills hjulet är helt blockerat (separat för vänster och höger hjul). Observera att parkeringsbromsen endast är avsedd att låsa hjulen när rullstolen står helt stilla.

BROMSAR FÖR LEDSAGARE

Bromsspakarna är placerade bakom ryggstödet, under båda handtagen.

- För att stoppa rullstolen, tryck ihop bromshandtagets spak. För att lossa bromsen, släpp spakarna. Utför denna åtgärd mjukt och med lämplig kraft.
- Bromsarna är utrustade med parkeringslås. För att använda dem, tryck ihop bromshandtagets övre spak tills du hör ett "click"-ljud. För att lossa parkeringsbromsarna, tryck ihop bromshandtagets nedre spak.

JUSTERING AV PARKERINGSBROMS

Korrekt låsning av parkeringsbromsen beror på dess justering och position. Handtaget för hjullåset bör placeras så att bromsskon blockerar hjulet ordentligt och spaken inte möter överdrivet motstånd.

- Vid överdrivet motstånd, dra handtaget något framåt genom att skruva loss låsskruvarna som sitter på parkeringsbromsen. Ställ in bromsskon i sådan position att den enkelt blockerar hjulet utan överdrivet motstånd.
- När parkeringsbromsens bromssko inte vidrör eller låser hjulet tillräckligt, följ ovanstående instruktion genom att flytta handtaget i motsatt riktning.

TYNGDPUNKTSJUSTERING PÅ FRAM-/BAKHJUL

(JUSTERING FÖR PATIENT EFTER AMPUTATION I OMRÅDET FÖR NEDRE EXTREMITETER)

Obs! För professionell justering, kontakta din återförsäljare eller annan person som har lämplig kunskap och kvalifikationer. Justera inte sitsens lutningsvinkel själv.


- För att justera tyngdpunkten på framhjulen, skruva loss bultarna i höger och vänster hjul med monteringsnycklarna som medföljer rullstolssetet (bild 3). Ställ sedan in sitsens lutning genom att flytta hjulets fästaxel nedåt eller uppåt (samma på båda hjulen).
- För att justera tyngdpunkten på bakhjulen, skruva loss bultarna i höger och vänster hjul med monteringsnycklarna som medföljer rullstolssetet (bild 1 och 2). Ställ sedan in sitsens lutning genom att flytta hjulets fästaxel framåt, bakåt, nedåt eller uppåt (beroende på patientens behov, samma i båda hjulen).



JUSTERING AV VINKEL PÅ FRAMHJUL

Obs! För professionell justering, kontakta din återförsäljare eller annan person som har lämplig kunskap och kvalifikationer. Justera inte rullstolens framhjulsvinkel själv.

- För att justera framhjulets vinkel, skruva loss bultarna som sitter på rullstolens insida (bild 4) med hjälp av monteringsnycklarna. Ta bort kåpan och brickan. Greppa framhjulet lätt och tryck bulten från insidan framåt. Greppa bultkåpan på rullstolens utsida och vrid åt vänster/höger, och ställ in ny vinkel enligt användarens behov (bild 5). Sätt tillbaka brickan och kåpan och dra åt den med en monteringsnyckel.

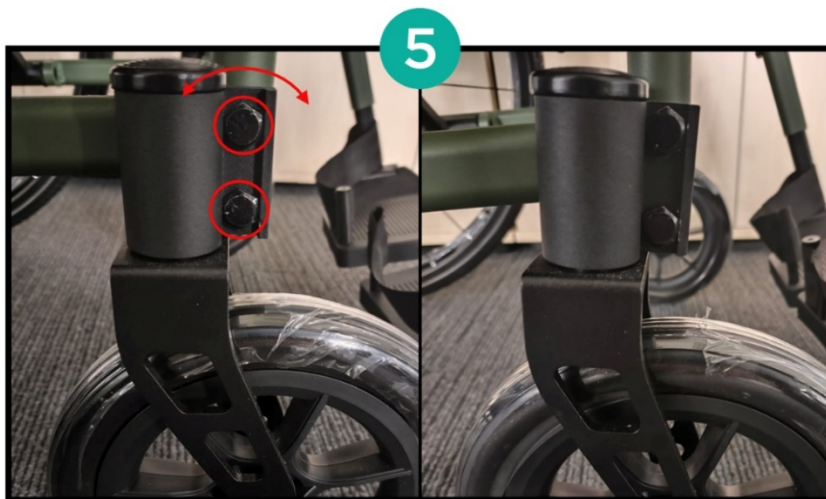

4. Före användning

Steg 1. Kontroll av rullstolens skick

Kontrollera bromsarnas, konstruktionens och däckens skick. Kontrollera om alla komponenter är korrekt monterade och justerade.

Obs! Använd inte rullstolen om några defekter upptäcks.

Steg 2. Användning av parkeringsbromsar

Lås hjulen när du sätter dig i eller stiger ur rullstolen.

Steg 3. Fotplattor

Fotplattorna bör ställas i vertikalt läge när du sätter dig i eller stiger ur rullstolen. Använd inte fotplattorna som stöd när du sätter dig i eller stiger ur rullstolen, på grund av fallrisk. Efter förflyttning till rullstolen, fäll ut fotplattorna.

Obs! Stå inte på fotplattorna på grund av risk för skada.

Steg 4. Att sätta sig i rullstolen

Rullstolen bör placeras så nära patienten som möjligt. Rullstolen bör vidröra sängen eller annan sits som används. Om användaren inte kan byta sits självständigt, flytta användaren till rullstolen.

Steg 5. Användarens position

Användaren bör sitta i upprätt position och knäna bör vara böjda i en vinkel på 90°.

Rullstolen är klar att användas.

5. Tekniska data

Sitsbredd: 44/46/49 cm	Sitsdjup: 43-48 cm
Totalt djup: 105 cm	Ryggstödet höjd från sitsen: 43-53 cm
Total bredd: 62/64/67 cm	Armstödet höjd: 18,6-27 cm
Sitshöjd från marken: fram: 48-50 cm bak: 41,5-49 cm	Mått efter hopfällning: 44/46 cm – 75 x 29 x 73,5 cm 49 cm – 75 x 29 x 76 cm

Total höjd: 93,5-103,5 cm	Vikt: 11,30-11,50 kg
Maximal belastning: 125 kg	

6. Anmärkningar

Timago International Group ansvarar inte för felaktig användning av produkten, underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifter och missbruk.

7. Rengöring och underhåll

Utför underhåll av rullstolens komponenter regelbundet:

- Klädseln och dynan kan rengöras med en fuktig (inte våt) trasa och kallt eller varmt vatten, utan användning av rengöringsmedel. Svåra fläckar kan rengöras med en svamp. Blötlägg inte klädseln för mycket. Torka bort från värmekällor.
- Plastdelar bör rengöras med en fuktig trasa, eventuellt med användning av lämpliga rengöringsmedel för plastdelar. Följ i så fall säkerhetsåtgärderna och instruktionerna som anges av tillverkaren.

8. Förvarings- och transportförhållanden

Produkten bör inte utsättas för direkt solljus, vatten eller fukt.

9. Garantiinformation

Alla produkter som distribueras av vårt företag omfattas av garanti, vars villkor beskrivs i garantikortet som finns tillgängligt på vår webbplats. Kontakta återförsäljaren som du köpte produkten från. Tänk på att inköpsbeviset (kvitto eller faktura) bör sparas för garantiändamål.

10. Incidenter med medicintekniska produkter

Alla allvarliga incidenter som involverar en medicinteknisk produkt måste rapporteras till tillverkaren och till den behöriga myndigheten i den EU-medlemsstat där användaren eller patienten är bosatt.

11. Etiketter

	Referensnummer		Tillverkare
	LOT-nummer		UDI-kod
	Serienummer		Medicinteknisk produkt
	Obs		Läs instruktionen



Produkten uppfyller Europeiska unionens rättsliga krav för
medicintekniska produkter (MDR 2017/745)

Hela vårt produktsortiment finns tillgängligt hos våra distributörer. Läs mer på:
www.timago.com. Tack för att du valde Timago!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



06/2026 (I)