

BRUKSANVISNING

Sänggrind

Produktkod: HandyGrip




1. Egenskaper

Sänggrinden är tillverkad av slitstarkt, pulverlackerat stål. Den har ett skumhandtag och en ficka för småsaker. Grinden levereras med skruvar och ett säkerhetsbälte, vilket ger användaren extra stabilitet och komfort.

Satsen innehåller: sänggrind med ficka, skruvar, säkerhetsbälte.

Räckets delar:

- A. Handtag
- B. Ramens fällmekanism
- C. Ficka för föremål
- D. Nedre ram
- E. Övre ram

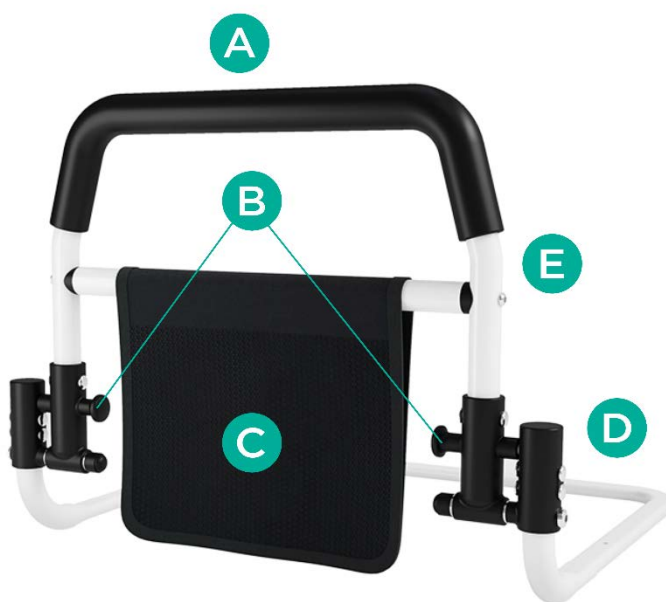

2. Användning

Sänggrinden är utformad för att ge stöd vid uppstigning eller övergång från liggande till sittande ställning i sängen. Grinden rekommenderas för personer med nedsatt rörlighet som hindrar dem från att utföra dagliga aktiviteter utan hjälp. Sänggrinden rekommenderas för användning både vid vård på vårdinrättningar och i hemmet.

3. Montering

Steg 1. Ta ut sänggrinden ur kartongen och fäll ut den tills du hör ett klickande ljud.

Steg 2. Placera sänggrindens underram på sängbotten, med överramen vänd utåt.

För extra säkerhet bör sänggrinden monteras på två sätt:

- Skruvar som medföljer satsen: placera den nedre ramen på sängbotten och fäst den med skruvar med hjälp av en skruvdragare eller bormaskin.
- Säkerhetsbälte som medföljer satsen: placera den nedre ramen på sängbotten och fäst den med bältet runt sängbotten.

Steg 3. Placera madrassen på sängen så att den täcker sänggrindens nedre ram. **Sänggrinden är nu klar att användas.**

FÄLLNING/UTFÄLLNING

Sänggrinden kan fällas ihop, vilket underlättar förvaring eller transport vid behov:

- För att fälla ihop sänggrinden för transport, ta tag i ramens fällmekanism (B) och dra utåt, vilket sänker sänggrindens övre ram.
- För att fälla ut ramen, ta tag i den övre ramen vid handtaget och fäll upp den tills

4. Tekniska data

Totalhöjd	44 cm
Total bredd	57 cm
Total djup	50 cm
Handtagslängd	38 cm
Mått efter hopfällning	50 x 57 x 14,5 cm
Tjocklek på nedre ramrör	1,2 cm
Vikt	2,00 kg
Max. viktkapacitet	136 kg

5. Anmärkningar

Timago International Group tar inget ansvar för felaktig användning av produkten, bristande efterlevnad av säkerhetsföreskrifter eller missbruk.

6. Skötsel

Rengör ramen och väskan regelbundet med en fuktig trasa, utan att använda rengöringsmedel. Torka noggrant. Svåra fläckar på väskan kan rengöras med en svamp.

7. Förvarings- och transportförhållanden

Produkten får inte utsättas för direkt solljus, vatten eller fukt.

8. Garantiinformation










Alla produkter som distribueras av vårt företag omfattas av garanti. Garantivillkoren finns i garantikortet på vår webbplats. Kontakta återförsäljaren

där du köpte produkten. Tänk på att för garantiändamål ska inköpsbeviset (kvitto eller faktura) sparas.

9. Händelser med medicintekniska produkter

Alla allvarliga händelser som involverar en medicinteknisk produkt ska rapporteras till tillverkaren och till den behöriga myndigheten i den medlemsstat i Europeiska unionen där användaren eller patienten är bosatt.

10. Etiketter

	Referensnummer		Tillverkare
	Partinummer		UDI-kod
	Serienummer		Medicinteknisk produkt
	Obs!		Vänligen läs instruktionen
	Produkten uppfyller Europeiska unionens lagstadgade krav för medicintekniska produkter (MDR 2017/745).		

Vårt kompletta sortiment finns tillgängligt via våra distributörer. Läs mer på: www.timago.com. Tack för att du valt Timago!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



04/2026(I)