

BRUKSANVISNING

Skummadrass med tvättbart, ånggenomsläppligt överdrag

Produktkod: MOON-TIM



Innan produkten används, läs denna bruksanvisning. Den innehåller information som är nödvändig för säker och korrekt användning av produkten samt hur den ska underhållas och rengöras. Användning av produkten i strid med denna bruksanvisning kan medföra allvarliga komplikationer. Bruksanvisningen bör förvaras på en lättillgänglig plats.

1. Egenskaper

Madrassen är tillverkad av polyuretanskum och levereras med ett tvättbart, ånggenomsläppligt överdrag med dragkedja.

2. Användning

Skummadrassen bidrar till korrekt stöd för kroppen i ryggradens olika delar och påverkar dessutom regleringen av muskelspänning i vila. Den används under behandling, konvalescens eller rehabilitering samt för permanent immobiliserade patienter.

3. Kontraindikationer för användning:

- Använd inte produkten om den inte passar sängramen.
- Använd inte produkten för andra ändamål än det avsedda.
- Använd inte produkten nära öppen eld eller på heta ytor. Detta kan orsaka allvarliga skador på användaren och leda till allvarliga hälsoproblem.

4. Anmärkningar



Tillverkaren ansvarar inte för felaktigt underhåll av produkten, bristande efterlevnad av säkerhetsföreskrifter eller felaktig användning.

- Huden vid kontaktpunkten ska vara ren.
- Det är nödvändigt att regelbundet kontrollera patientens hudtillstånd.
- Användarens position bör ändras regelbundet för att undvika uppkomst av trycksår/sår.
- Använd inte vassa föremål eller utrustning som kan skada överdraget.
- Madrassen ska anpassas till sängens storlek.
- Upprätthåll hög hygien av madrassöverdraget: rengör och/eller tvätta det.

- Om produkten inte längre är lämplig för användning ska den kasseras. Före kassering ska produkten rengöras för att eliminera risken för kontaminering.
- Om några oönskade symtom uppstår till följd av användningen av produkten ska detta rapporteras till tillverkaren och till den behöriga myndigheten i det medlemsland där användaren eller patienten är bosatt.

5. Uppackning och anpassning

- När du tar emot madrassen, öppna förpackningen försiktigt för att undvika skador.
- Lägg madrassen på en plan yta och vänta tills alla deformationer som uppstått under transporten återgår till sin ursprungliga form.
- Madrassen ska anpassas till patientens säng för att fullt ut uppfylla sina funktioner.

6. Tekniska data

PARAMETRAR	MOON-TIM
Längd	200 cm
Bredd	90 cm
Höjd	10 cm
Maximal belastning	100 kg

7. Rengöring och underhåll

- Tvätta inte skummadrassen.
- Tvätta överdraget efter att skuminsatsen har tagits bort med ett mildt tvättmedel vid temperaturer upp till 90°C.
- Överdraget kan steriliseras vid temperaturer upp till 120°C.
- Överdraget kan desinficeras med upp till 60 % alkohollösning.
- Använd inte blekmedel eller kemikalier.
- Får inte kemtvättas.
- Använd inte kemikalier som innehåller klor.
- Torkning i utbrett tillstånd rekommenderas.
- Undvik kraftig nedsmutsning.

8. Förvarings- och transportförhållanden

Produkten får inte utsättas för direkt solljus, vatten eller fukt.

9. Garantiinformation

Alla produkter som distribueras av vårt företag omfattas av garanti. Garantivillkoren finns i garantikortet på vår webbplats. Kontakta återförsäljaren där du köpte produkten. Tänk på att för garantiändamål ska inköpsbeviset (kvitto eller faktura) sparas.









REKLAMATIONER OMFATTAR INTE:

- Mekaniska skador (slitage, repor).
- Skador som uppstår vid normal användning.
- Defekter som uppstår till följd av felaktig anpassning av madrassen till sängen.
- Defekter som uppstår till följd av att användningsvillkor eller rengörings- och underhållsanvisningar inte följs.
- Missfärgning av överdraget.
- Användarkomfort.

10. Händelser med medicintekniska produkter

Alla allvarliga händelser som involverar en medicinteknisk produkt ska rapporteras till tillverkaren och till den behöriga myndigheten i den medlemsstat i Europeiska unionen där användaren eller patienten är bosatt.

11. Etiketter

	Referensnummer		Tillverkare
	Partinummer		UDI-kod
	Serienummer		Medicinteknisk produkt
	Obs!		Vänligen läs instruktionen

	Utgångsdatum		Tillåten lagringstemperatur
	Förvaras på en torr plats		Skyddas mot solljus
	Förpackningen är återvinningsbar		Förpackningen ska kasseras som avfall
	Produkten uppfyller Europeiska unionens lagstadgade krav för medicintekniska produkter (MDR 2017/745)		

Vårt kompletta produktsortiment finns tillgängligt hos våra distributörer. Läs mer på: www.timago.com. Tack för att du valde Timago!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



04/2026 (I)