

# BRUKSANVISNING

## Dusch- och toalettstol

Produktkod: Movano



### 1. Egenskaper

Dusch- och toalettstolen är tillverkad av hållbart PP (polypropen). Den har höjdjusterbara aluminiumben med halksäkra gummifötter. Justeringen gör det möjligt att anpassa stolen efter användarens individuella behov. Ryggstöd och sits är utrustade med mjuka, avtagbara kuddar. Sidostöd ökar stabilitet och säkerhet. Stolen är utrustad med en lätt utdragbar sanitetsbehållare med lock.

**Setet innehåller:** sitsram, ryggstöd, armstöd (2 st), ben med fötter (4 st), sittkudde, ryggkudde, sanitetsbehållare med lock.

#### Delar av toalettstolen:

- A. ryggstöd
- B. ryggkudde
- C. armstöd
- D. sittkudde
- E. sitsram
- F. ben
- G. halksäker fot
- H. sanitetsbehållare



### 2. Användning

Dusch- och toalettstolen är ett hjälpmedel som underlättar utförandet av hygieniska aktiviteter. Den rekommenderas för personer med nedsatt rörlighet eller funktionsbegränsningar som försvårar eller hindrar självständigt utförande av dagliga aktiviteter. Stolen har en toalettfunktion tack vare sanitetsbehållaren under sitsen. Den underlättar dagliga fysiologiska och vårdrelaterade aktiviteter.

Stolen rekommenderas även för användning i dusch och bad, både i hemmet och i vårdmiljöer.

### 3. Montering, justering och användning

#### UTFÄLLNING

**Steg 1:** Vänd stolsramen upp och ner och sätt i benen i monteringshålen. Benen har låsstift – tryck in stiftet innan du sätter i benet och lås det sedan.

**Steg 2:** Justera benens höjd med justeringsstiften.

**Steg 3:** Vänd stolen till upprätt position och placera den på golvet.

Obs: Alla fyra ben måste justeras till samma höjd och stå stadigt på golvet för att säkerställa stabilitet.

**Steg 4:** Sätt i ryggstödet i monteringshålen på sitsramen (låsmekanism).

**Steg 5:** Sätt i båda armstöden i monteringshålen på sitsramen (låsmekanism).

**Steg 6:** Sätt sanitetsbehållaren med lock i hålet i sitsramen.

**Steg 7:** Sätt i ryggkudden i monteringshålen på ryggstödet (3 fästen).

**Steg 8:** Placera sittkudden på stolen – dess form gör den lätt att passa in.

#### HÖJDJUSTERING

För att justera stolens höjd, tryck in justeringsstiften på benen, välj önskad höjd och lås sedan inställningen med stiftet. Benen kan justeras i steg om 2,5 cm.

**Obs:** Alla ben måste vara inställda på samma nivå och stå stadigt på golvet.

#### ANVÄNDNING

Lyft sittkudden och ta bort locket från sanitetsbehållaren. Efter användning sätt tillbaka locket och placera sittkudden på sitsen.

**Obs!** Kom ihåg att tömma sanitetsbehållaren efter varje användning.

### 4. Tekniska data

|             |       |
|-------------|-------|
| Total bredd | 56 cm |
|-------------|-------|

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Total djup             | 48 cm         |
| Ryggstödshöjd          | 35 cm         |
| Sitshöjd från golvet   | 41-53 cm      |
| Total höjd från golvet | 79-88 cm      |
| Sitsmått               | 46 cm x 43 cm |
| Vikt                   | 5,1 kg        |
| Maximal belastning     | 150 kg        |
| Färg                   | grå           |

## 5. Anmärkningar

**Timago International Group ansvarar inte för felaktig användning av produkten, bristande efterlevnad av säkerhetsföreskrifter eller missbruk.**

## 6. Underhåll

**Utför regelbundet underhåll av stolens tekniska skick:**

- Rengör toalettstolen regelbundet med endast vatten och milda rengöringsmedel. Torka noggrant.
- Använd inte starka polermedel, rengöringsmedel, slipmedel, blekmedel, bensin eller lösningsmedel (det kan skada ramen, orsaka synliga defekter och leda till förlorad garanti).
- Töm och desinficera sanitetsbehållaren och toalettsitsen efter varje användning.

## 7. Uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi

Izstrādājumu nedrīkst pakļaut tiešiem saules stariem, ūdenim vai mitrumam.

## 8. Garantijas informācija

Visiem mūsu uzņēmuma izplatītajiem produktiem ir garantija, kuras nosacījumi ir aprakstīti garantijas kartē, kas pieejama mūsu mājaslapā. Lūdzam sazināties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka garantijas piemērošanai jāuzrāda pirkuma dokuments (čeks vai rēķins).

## 9. Marķējumi

|                                                                                   |                                                                                     |                                                                                   |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | Produkta atsaucē numurs                                                             |  | Ražotājs                               |
|  | Partijas numurs (LOT)                                                               |  | UDI kods                               |
|  | Sērijas numurs                                                                      |  | Medicīniska ierīce                     |
|  | Piezīme                                                                             |  | Lūdzu, izlasiet lietošanas instrukciju |
|  | Ražotājs ir pārbaudījis produkta atbilstību medicīnisko ierīču būtiskajām prasībām. |                                                                                   |                                        |

Mūsu pilns produktu klāsts ir pieejams pie mūsu izplatītājiem. Uzziniet vairāk: **[www.timago.com](http://www.timago.com)**. Paldies, ka izvēlējāties Timago!



### **Timago International Group**

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)



12/2025(I)