

BRUKSANVISNING

Hydraulisk toalett- och överföringsstol

Produktkod: SAFE-TRANSFER



1. Egenskaper

Den hydrauliska toalett- och överföringsstolen har en stålramskonstruktion. Den är utrustad med ett mjukt, vadderat ryggstöd, säte och armstöd samt ett litet bord med profilerad mugghållare. Den är försedd med en sanitetsbehållare, fyra svängbara 5"-hjul med bromsar och fotstöd. Stolens konstruktion gör det möjligt att placera den över en toalettstol.

Setet innehåller: övre ram, nedre ram, sätets ram med ryggstöd, hydropump, pumpkåpa, hävarm, pumpens hävarmslock, bord, armstöd, rör (2 st), säkerhetsbälte, metallram för behållare, monteringsverktyg (skruvar, monteringsnycklar, vred, monteringshandtag etc.).

Delar av överföringsstolen:

- A. Ryggstöd
- B. Armstöd
- C. Vadderat säte
- D. Bord
- E. Skjuthandtag
- F. Hydraulisk pump
- G. Fotstöd
- H. 5" hjul med broms
- I. Höjdjusteringsspak
- J. Övre ram
- K. Nedre ram
- L. Sanitetsbehållare



2. Användning


Hydrauliska toalett- och överföringsstolar är avsedda för personer som har svårt att förflytta sig utan assistans samt för patienter med funktionsnedsättningar eller nedsatt rörlighet. Stolen är endast avsedd för användning inomhus och får endast

användas med hjälp av en medhjälpare. Den fungerar både som toalettstol och transportstol tack vare sanitetsbehållaren under sätet och de fyra svängbara hjulen med bromsar. Den underlättar dagliga hygienaktiviteter. Stolen rekommenderas särskilt för personer med rörlighetsproblem som orsakas av: förlamning, fetma eller onormalt undervikt, degenerationer eller deformiteter i lemmar, degenerationer eller skador i leder, lemskador eller amputationer, hjärt- och kärlsjukdomar samt cirkulationsstörningar.

3. Montering

Monteringsverktyg:

1. Insexnyckel 3 mm
2. Insexnyckel 4 mm
3. Insexnyckel 6 mm
4. Skruvnyckel
5. Monteringsstool / nyckel
6. Distansstycke (4 st)
7. Fjäderbricka (4 st)
8. Sexkantlock
9. M8*30 skruvar (4 st)
10. M8*50 skruvar (4 st)
11. M5*35 skruvar (4 st)
12. Sexkantsbult (svart)
13. M6*40 skruv
14. Kort sexkantskruv

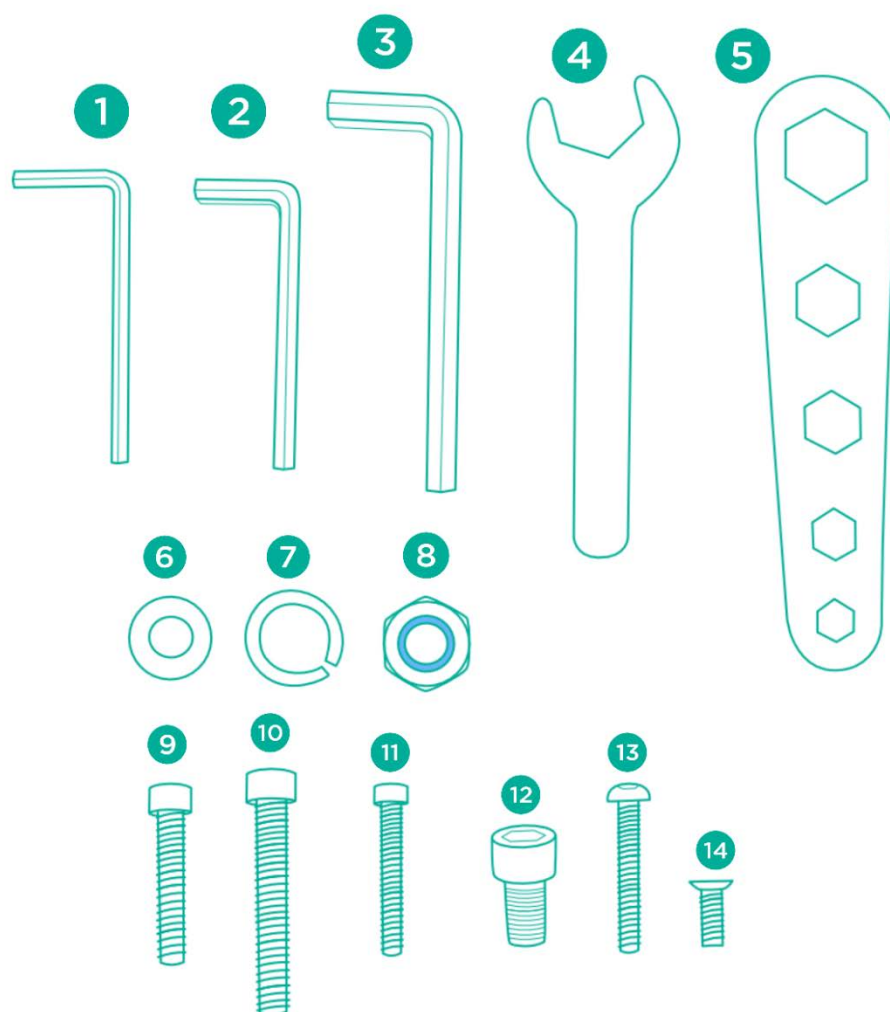

Före montering: Det rekommenderas att ha en assisterande person när överföringsstolen monteras, på grund av dess tunga vikt och de olika delarna som måste hållas på plats under installationen. Följ alla monteringssteg och kontrollera stolen efter montering innan den tas i bruk. Försök inte använda stolen om något av stegen har utelämnats eller om satsen inte innehåller alla delar som anges i instruktionerna.



Steg 1. Packa upp alla delar av överföringsstolen från kartongen. Ta hydraulpumpen (F) och sätt plastkåpan på den. Fäst den med den korta sexkantskruven (14) och dra åt med insexnyckel (2).

Steg 2. Montera höjdjusteringsspaken (I) på sidan och säkra den med sexkantsbulten (12). Sätt den silverfärgade plastkåpan ovanpå efter att du försäkrat dig om att spaken är korrekt monterad.

Steg 3. Ta ut de fyra svängbara hjulen med bromsar (H) och montera dem med fjäderbrickorna (7) upptill i öppningarna på den nedre ramen (K). Håll hjulet med ena handen och vrid plastdelen mot dig med den andra (bild 1). Dra sedan åt med skruvnyckeln (4) för att säkerställa korrekt montering.

Steg 4. Lås hjulen innan du fortsätter. Montera pumpen (F) på den nedre ramen och säkra den med distansstyckena (6) och M8*30-skruvarna (9) genom öppningarna på undersidan av ramen (bild 2).

Obs! Försök inte montera pumpen när den nedre ramen står på sidan på grund av dess vikt (om du inte assisteras av en annan person). Det rekommenderas att montera pumpen när den nedre ramen ligger på golvet.

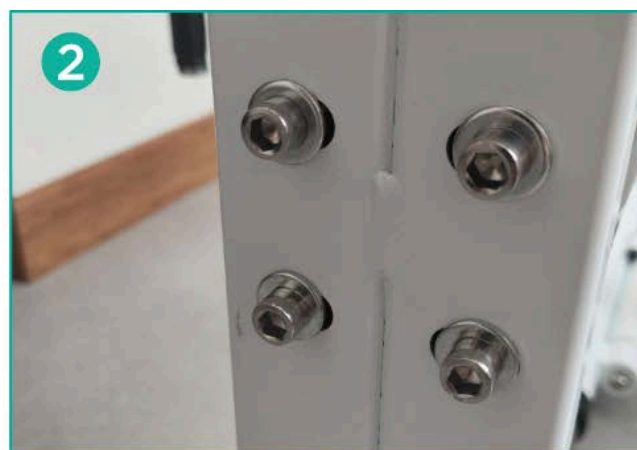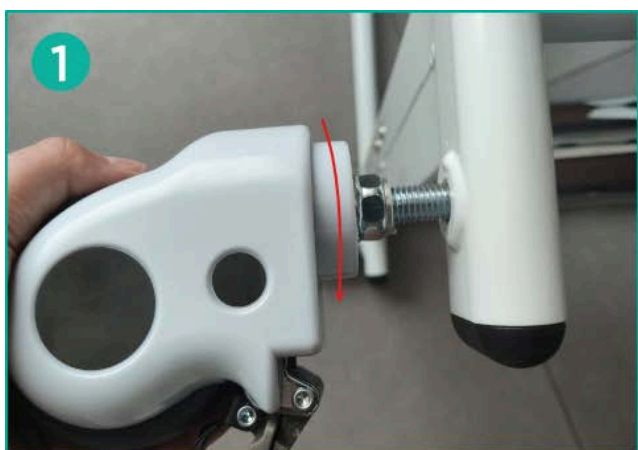

Steg 5. Sätt in de två silverfärgade metallrören i de två öppningarna på den nedre ramen (K), vilka ska koppla samman den övre och nedre ramen. Säkra dem med de två monteringsvreden som ingår i setet (bild 3).

Steg 6. Kontrollera om öppningen i metallröret på pumpen (F) är placerad i mitten. Om inte, sätt in en metallpinne eller en insexnyckel i hålet, tryck ner spaken (I) och ändra rörets position genom att vrida det så att öppningen hamnar i mitten (bild 4).



Steg 7. Placera överdelen av överföringsstolen på metalrören på den nedre ramen och pumpen. För in M6*40-skruven (13) i öppningen som förbinder pumpröret med det mellersta röret på den övre ramen. Dra sedan åt skruven.

Steg 8. Ta en av de två sättramarnas delar och placera den mellan de två stödstavarna på ramen. För in M8*50-skruven (10) i öppningen och dra åt med insexnyckel (3) (bild 5). För in den andra skruven i öppningen under den nedre stödstången. Upprepa processen med den andra sättramen.


Obs! Det rekommenderas att ha en assisterande person som håller sättramen på plats under monteringen.

Steg 9. Koppla samman båda delarna av sättramen och säkra dem med låshandtaget och remmen bakom ryggstödet (bild 6).



Steg 10. Montera armstöden på ramen och fäst dem med M5*35-skruvarna (11). Kontrollera att den markerade delen av armstödet (gul linje på bilden) är vänd utåt (bild 7).

Steg 11. Fäst den vita metallramen för behållaren under sätet genom att placera den på de särskilda fästpunkterna bakom sätet och haka fast metallkrokarna i öppningarna på den främre ramen (bild 8).

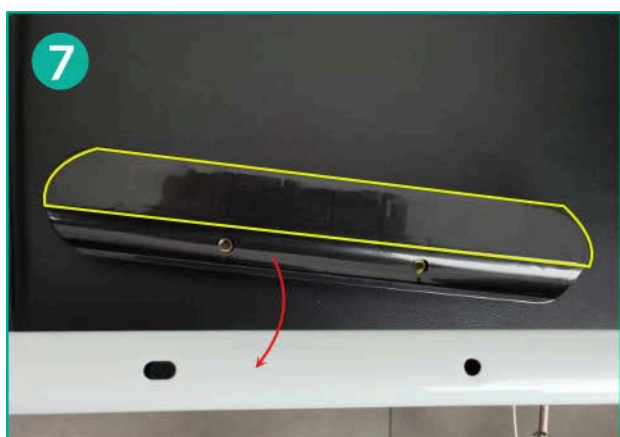

Steg 12. Sätt in sanitetsbehållarens hink bakifrån på metallramen.

Steg 13. Fäst de svarta handtagen i öppningarna på bordet. Placera sedan handtagen i öppningarna på den främre ramen så att den profilerade delen av bordet är vänd mot sätet (bild 9).

Steg 14. Säkra sätet med de speciella sprintarna på sidorna (bild 10). Se till att ta bort sprintarna när det vadderade sätet tas bort.



Steg 15. Installera säkerhetsbältet.

Steg 16. Kontrollera monteringen av alla skruvar och delar och dra åt dem vid behov.

Produkten är redo att användas.

HYDRAULPUMP

Överföringsstolen är utrustad med en hydraulpump som gör det möjligt för assistenten att justera sätets höjd, vilket gör att patienten kan förflyttas utan att använda överdriven kraft.

- För att höja sätet: Tryck lätt flera gånger på spaken (I) med foten tills önskad höjd uppnås.
- För att sänka sätet: Tryck ned och håll spaken (I) med foten tills stolen börjar sänka sig.

HANTERING AV ÖVERFÖRINGEN

- För att sätta sig i stolen: Öppna sätet genom att dela det i två delar. Placera den nedre ramen under sängen och för den så nära patienten som möjligt, och lås hjulens bromsar. Skjut försiktigt in ena delen av sätet under patienten, därefter den andra, och koppla samman delarna. Säkra dem igen med handtaget och bältet. Kontrollera att patienten sitter korrekt och har fötterna på fotstöden.
- Om stolen används som toalettstol, montera metallramen för behållaren och sanitetsbehållaren under sätet. Ta bort det vadderade sätet för att omvandla sätet till en toalettsits med kilöppning.

- Under förflyttningen ska patientens fötter alltid vara placerade på fotstöden.
- Kontrollera bromsarnas, lyftmekanismens, konstruktionens och hjulens skick. Kontrollera komponenternas korrekta montering och justering.
- Innan användning, säkerställ att stolens bredd passar användaren, eftersom den inte är utrustad med breddjustering.
- Stolen är avsedd endast för korta sträckor och endast för användning inomhus. Den har ingen stötdämpning, därför rekommenderas inte långvarig användning.
- Försök inte att gå in i stolen på egen hand. Patienten måste alltid förflyttas med hjälp av en annan person.
- Sitt inte på det öppna sätet och försök inte att sätta dig i stolen om sätet inte är placerat på sängen eller annan sittyta, eftersom detta kan orsaka att stolen välter.
- Det är absolut nödvändigt att låsa bromsarna när patienten förflyttas, när användarens position ändras eller när användaren lämnar stolen.
- Under förflyttning ska sätet placeras så nära personen som möjligt. Sätet ska ligga an mot sängen eller annan sittyta. Om användaren inte kan förflytta sig självständigt, hjälp användaren in i stolen.
- Användaren ska sitta så långt bak som möjligt i mitten av sätet för att garantera stolens stabilitet.

Obs! Använd inte produkten om några brister eller skador upptäcks.

BROMSAR

- För att låsa hjulen: Tryck på de nedre pedalerna med foten.
- För att låsa upp hjulen: Tryck på de övre bromspedalerna.

ANVÄNDNING SOM TOALETSTOL

- Ta bort det vadderade sätet och installera hinken. Efter användning, ta bort hinken och sätt tillbaka sätet.
- Om stolen används som stöd över en toalettstol, använd ett engångsskydd för att hålla sätet i hygieniskt skick.

Obs! Kom ihåg att tömma toalett-hinken efter varje användning.

4. Tekniska data

Total bredd	54 cm
Invändig bredd	47 cm
Total djup	85 cm

Säteshöjd från golvet	48-68 cm
Total höjd	86-106 cm
Sätessmått	47 x 39 cm
Vikt	31,00 kg
Maximal belastning	150 kg
Ramfärg	vit

5. Anmärkningar

Timago International Group tar inget ansvar för felaktig användning av produkten eller för underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifterna.

6. Rengöring och underhåll

Utför regelbundet underhåll av stolens komponenter:

- Sätet kan rengöras med en fuktig trasa och kallt eller varmt vatten, utan att använda rengöringsmedel. Svåra fläckar kan avlägsnas med en svamp.
- Plastdelar ska rengöras med en fuktig trasa och lämpliga rengöringsmedel avsedda för plast. Följ alltid tillverkarens anvisningar och säkerhetsföreskrifter.
- Töm och desinficera toaletthinken och toaletsitsen efter varje användning. Använd rengöringsprodukter enligt tillverkarens rekommendationer.
- Kontrollera regelbundet skicket på skruvar, bultar, vred och andra monteringsdelar på överföringsstolen.

7. Förvarings- och transportförhållanden

Produkten får inte utsättas för direkt solljus, vatten eller fukt.

8. Garantiinformation

Alla produkter som distribueras av vårt företag omfattas av garanti. Garantivillkoren finns i garantikortet på vår webbplats. Kontakta återförsäljaren där du köpte produkten. Tänk på att för garantiändamål ska inköpsbeviset (kvitto eller faktura) sparas.

9. Etiketter

	Referensnummer		Tillverkare
---	----------------	---	-------------

	Partinummer		UDI-kod
	Serienummer		Medicinteknisk produkt
	Obs!		Vänligen läs instruktionen
	Tillverkaren har kontrollerat att kraven för medicintekniska produkter uppfylls.		

Vårt kompletta sortiment finns tillgängligt via våra distributörer. Läs mer på: **www.timago.com**. Tack för att du valt Timago!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



11/2025(I)