

BRUGSANVISNING

Aluminium kørestol

Produktkode: SIMPLE-TIM



1. Karakteristika

Kørestolen er lavet af let aluminiumsstel forstærket med dobbelt tværstang. Den har polstret ryglæn og sædehynde. Armlæn udføres i profileret udgave. Kørestolen er udstyret med quick release funktion, der muliggør hurtig afmontering af hjul, anti-tip hjul, sikkerhedssele, ledsagende bremses og foldbart ryglæn. Fodstøtter fås i en swing away-version. Kørestolen leveres med solide baghjul 22" og massive gummiforhjul 6" i diameter. For patienter efter amputationer er der mulighed for at justere tyngdepunktet på forhjulene.

Sættet indeholder: stel med sæde, hynde, beskyttelsesrem, nøglesæt til montering/afmontering af kørestol

Elementer i kørestolen:

- A. Håndgreb
- B. Hjælperbremse
- C. Ryglåsemekanisme / Rygstøttelås
- D. Armlæn
- E. Hjulbremse
- F. Kørehjulring / Drivring
- G. Hurtigudløser
- H. Fodstøtte



2. Anvendelse

Kørestolen er designet til personer, der har problemer med uassisteret flytning og til patienter med dysfunktioner og nedsat mobilitet. Denne selvkørende kørestol kan også skubbes af en ledsager. Kørestolen er velegnet til indendørs og udendørs brug.

3. Montering og justering

UFOLDNING OG MONTERING

Trin 1. Udfoldning af kørestolen.

Placer kørestolen på jorden. Fold kørestolens ryglæn ud ved hjælp af håndtagene, der sidder bag på ryglænet. Pres derefter sidekanterne sammen, så alle dele af vognen passer sammen.

Trin 2. Justering af fodplader.

Juster højre og venstre fodplade ved at stramme justeringsskruen i den passende højde. Der bør efterlades tilstrækkelig plads mellem fodpladerne og jorden, da fodplader, der er sat for lavt, kan forårsage vanskeligheder med at overvinde sådanne forhindringer som kantsten. Juster fodpladerne, så vinklen mellem krop og lår er 90° (optimal siddeposition er da givet til brugeren).

Trin 3. Samling af beskyttelsesrem.

Sæt beskyttelsesremmen på fodstøtten, da den forhindrer brugerens ben i at glide ned under kørestolen fra fodplader.

Note! Brug ikke kørestolen uden beskyttelsesstrop.

Trin 4. Justering af anti-tip hjul.

For at justere anti-tip hjul, som er placeret bag på kørestolen, skal du trække i låsen, flytte hjulene opad eller nedad og vælge passende højde.

Trin 5. Kontrol af samlingen af hjul .

Løft kørestolen lidt, og drej det højre hjul og derefter det venstre ved at trække i drivringene og kontroller, om hjulene drejer rigtigt.

Trin 6. Samling af pude.

Fastgør hynden til sædet med velcro.

Efter afslutning af ovenstående aktiviteter er kørestolen klar til brug.

FOLDNING

Kørestolen kan foldes sammen igen, så den lettere kan transporteres og opbevares.

- Sving fodpladerne væk og sæt dem i lodret position (vinkelret på jorden).
- Tag fat i puden og løs den fra velcro.
- For at folde stellet trækkes sædet opad ved at holde for- og bagkanten i midten, så stellet springer ud fra forbindelseselementerne.
- Løft om nødvendigt anti-tip-hjulene til den maksimale højde.

HJULLÅSE

- For at låse hjulene skal du skubbe hjullåsehåndtaget fremad, indtil hjulet er helt blokeret (separat for venstre og højre hjul). Bemærk venligst, at hjullåsen kun tjener til at låse hjulene, når kørestolen står helt stille.

JUSTERING AF HJULSLÅSER

Den korrekte låsning af hjullåsen afhænger af dens justering og position. Hjullåsens håndtag skal placeres, så hjullåseskoen blokerer hjulet fast, og håndtaget ikke møder for stor modstand.

- Ved for stor modstand trækkes håndtaget lidt fremad ved at dreje låseskruen af, som er placeret på den anden side af hjullåsen (fra indersiden af kørestolen). Indstil hjullåseskoen i en sådan position, at hjullåsen let blokerer hjulet.
- Når hjullåseskoen ikke rører eller låser hjulet tilstrækkeligt, skal du følge ovenstående instruktion ved at flytte håndtaget i den modsatte retning.

BEMÆRKNINGER

Bremsernes håndtag er placeret bag ryglænet, under håndgrebene i højre og venstre side, og er forbundet med hjullås med kabel.

- For at aktivere nødbreknings- eller stoplås skal du klemme håndtaget på bremsen og slippe håndtagene for at udløse bremsen. Udfør denne aktivitet glat og med passende kraft.

Note! Disse bremsere bør ikke bruges til at bremse kørestolen. Hvis de ofte bruges til dette formål, kan de forårsage slid på dæk, som ikke vil være dækket af garantibetingelserne.

foldbar ryglæn

- For at folde ryglænet skal du samtidig trække nedad i låseelementerne, som er placeret under håndgrebene bag på ryglænet.

JUSTERING FOR PATIENTER EFTER AMPUTATIONER I OMRÅDET UNDERLEMMER

Note! For professionel tilpasning, spørg din forhandler eller en anden person, der har passende viden og kvalifikationer. Juster ikke sædets hældningsvinkel selv.

- For at justere tyngdepunktet skrues fastgørelsesskruen i højre og venstre hjul af. Indstil derefter sædets hældning ved at flytte hjulets fikseringsakse opad eller nedad, den samme i begge hjul.
- Sædets hældning bør indstilles på en sådan måde, at brugeren ikke glider ned fra kørestolen og frit kan bruge drivringe.

SIKKERHEDSSELE

- Selen, som er inkluderet i standardudstyret, beskytter bagagerummet i tilfælde, hvor brugeren glider ned fra kørestolen eller ikke er i stand til at holde korrekt position selvstændigt. Bæltet er justerbart med et spænde og fastgøres med velcro.

4. Tekniske data

Samlet bredde	64-69 cm
Indvendig bredde	43, 46, 48 cm
Samlet dybde	102 cm
Sædehøjde fra jorden	47 cm
Samlet højde	91 cm
Sæde dimensioner	42, 45, 47 cm x 40 cm
Vægt	14-16 kg
Maksimal kapacitet	115 kg
Foldet bredde	29 cm
Ramme farve	sølv

5. Bemærkninger og anvisninger

Timago International Group frasier sig ethvert ansvar for u hensigtsmæssig anvendelse af kørestolen, manglende overholdelse af sikkerhedsreglerne og anvendelse af kørestolen i strid med formålet.

6. Rengøring og vedligeholdelse

Kørestolens elementer skal vedligeholdes regelmæssigt:

- Kørestolen kan rengøres i koldt el. varmt vand m. en fugtet (ikke våd) klud, uden brug af rengøringsmidler. Vanskeligere pletter skal rengøres m. en svamp. Pas på, at betrækket ikke vædes for meget under rengøring. Tørres væk fra varmekilder.
- Plastdele skal rengøres m. en fugtet klud, evt. m. anvendelse rengøringsmidler til plast. Føl anvisningerne fra Producenten på området og sikkerhedsreglerne for brug af rengøringsmidler.

7. Opbevarings- og transportbetingelser

Produktet må ikke udsættes for direkte sollys, vand eller fugt.

8. Garantiinformation

Alle produkter, der distribueres af vores virksomhed, er dækket af en garanti, hvis betingelser er beskrevet i garantikortet, som findes på vores hjemmeside. Kontakt venligst forhandleren, hvor du har købt produktet. Husk at opbevare købsbeviset (kvittering eller faktura) for at kunne gøre brug af garantien.

9. Mærkater

	Referencenummer		Producent
	Batchnummer		UDI-kode
	Serienummer		Medicinsk udstyr
	Bemærk		Læs venligst brugsanvisningen
	Producenten har kontrolleret overensstemmelsen med væsentlige krav til medicinsk udstyr.		

Vores komplette sortiment af produkter fås hos vores distributører. Læs mere på: **www.timago.com**. Tak fordi du valgte Timago!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



07/2025(I)