

BRUGERVEJLEDNING

Badeværelsestrin

Produktkode: StepTim




1. Egenskaber

Badeværelsestrinnet er lavet af holdbart aluminium og fugtbestandigt PE-materiale. Det har højdejusterbare ben og specielle gummidupper, der giver bedre stabilitet.

Sættet indeholder: rammekomponenter (2 stk), monteringsrør (2 stk), ben med skridsikre dupper (4 stk), trin (base), monteringsskruer (2 stk).

Trinnets elementer:

- A. Trin (base)
- B. Ben med højdejustering
- C. Skridsikre dupper
- D. Monteringsskruer
- E. Ramme

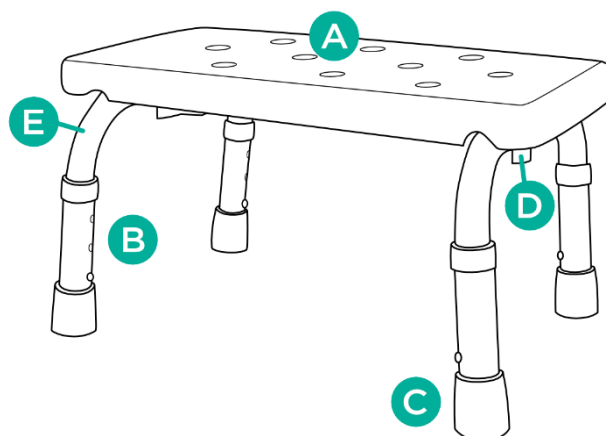

2. Anvendelse

Badeværelsestrinnet er et hjælpemiddel, der hjælper brugeren med at udføre hygiejniske aktiviteter. Trinnet anbefales til personer med nedsat mobilitet, der har svært ved at udføre daglige aktiviteter uden hjælp. Det anbefales til brug i badeværelse og andre fugtige rum, både i hjemmet og på hospitalet.

3. Montering

Trin 1. Forbind monteringsrørene med rammekomponenterne ved hjælp af låsepinde.

Trin 2. Monter rammekomponenterne med monteringsskruer på undersiden af trinnet.

Trin 3. Forbind benene med rammen og fastgør dem med låsepinde i den ønskede højde. Sørg for, at alle ben er i samme højde.

HØJDEJUSTERING

Tryk på låsepinden for at justere højden, vælg den ønskede højde, og fastgør den igen med pinden. Alle ben skal indstilles til samme højde.

4. Tekniske data

Højdejustering	23-28 cm
Samlet bredde	27 cm
Samlet længde	41 cm
Maks. belastningskapacitet	150 kg

5. Bemærkninger

Timago International Group påtager sig intet ansvar for forkert brug af produktet, manglende overholdelse af sikkerhedsregler eller misbrug.

6. Vedligeholdelse

Rengør trinnet regelmæssigt med kun vand, en svamp og milde rengøringsmidler til plastmaterialer såsom sæbe. Tør grundigt.

7. Opbevarings- og transportbetingelser

Produktet må ikke udsættes for direkte sollys, vand eller fugt.

8. Garantiinformation

Alle produkter, der distribueres af vores virksomhed, er dækket af en garanti, hvis betingelser er beskrevet i garantikortet, som findes på vores hjemmeside. Kontakt venligst forhandleren, hvor du har købt produktet. Husk at opbevare købsbeviset (kvittering eller faktura) for at kunne gøre brug af garantien.

9. Mærkater

	Referencenummer		Producent
	Batchnummer		UDI-kode
	Serienummer		Medicinsk udstyr
	Bemærk		Læs venligst brugsanvisningen



Producenten har kontrolleret overensstemmelsen med væsentlige krav til medicinsk udstyr.

Vores komplette sortiment af produkter fås hos vores distributører. Læs mere på: **www.timago.com**. Tak fordi du valgte Timago!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



07/2025(I)