

BRUKSANVISNING

Sängbord

Produktkod: TableTIM



1. Egenskaper

Sängbordet har en C-formad metallram och en bordsskiva med träutseende. Det är utrustat med en justerbar bordsskiva och hjul med bromsar, vilket gör det enkelt att flytta och placera över sängen.

Bordets delar:


- A. Ram
- B. Underrede med hjul
- C. Bordsskivans ram
- D. Monteringsskruv
- E. Bordsskiva
- F. Höjdjustering



2. Användning

Sängbordet är avsett att användas direkt över patientens säng och ger en yta för att äta, läsa eller skriva i sängen. Produkten är avsedd för användning både vid vård på medicinska inrättningar och i hemmet.

3. Montering och justering

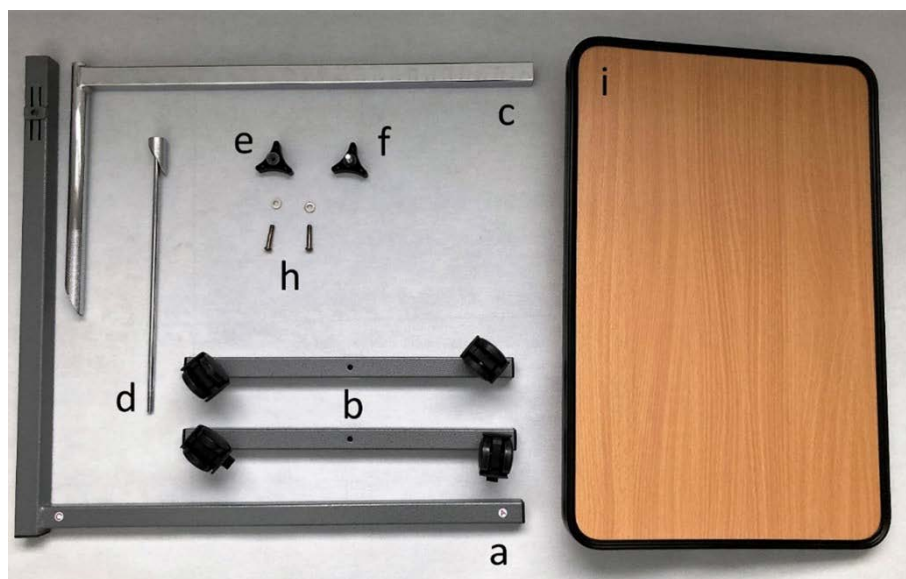

1. Fäst båda underredena med hjul (b) på huvudramen (a) genom att passa ihop motsvarande bokstavsmarkeringar – rikta till exempel bokstaven "A" på ramen mot "A" på underredet och gör på samma sätt med "B", "C" och "D".
2. När underredet är monterat, ställ bordet upprätt på de fyra hjulen och lås hjulbromsarna så att det står stabilt under fortsatt montering.
3. För in bordsskivans ram (c) i den fyrkantiga öppningen i huvudramen (a).
4. För in bordsskivans tapp (d) i det vinklade, fasade hålet i bordsskivans ram (c) så att de två fasade ytorna ligger i linje.
5. Skruva fast monteringsvingmuttern (e) på den utskjutande gängen på bordsskivans tapp (d). Dra inte åt för hårt; den ska sitta tillräckligt stadigt för att inte falla av.
6. Placera bordsskivan (i) på den förberedda ramen. Håll röret på undersidan av bordsskivan med ena handen för att underlätta monteringen. Dra åt monteringsvingmuttern (e) när bordsskivan är på plats.
7. Fäst slutligen monteringsvingmuttern med skruven (f) i det avsedda hålet på huvudramen (a) och dra åt den.

JUSTERING AV BORDSSKIVANS LUTNING

- För att justera bordsskivans vinkel, lossa monteringsvingmuttern (e) på sidan av bordsskivan.
- Dra åt monteringsvingmuttern (e) när rätt vinkel har ställts in.

JUSTERING AV BORDSSKIVANS HÖJD

- För att justera bordsskivans höjd, lossa monteringsvingmuttern med skruv (f) på basramen (a).
- Dra åt monteringsvingmuttern med skruv (f) när rätt höjd har ställts in.

BROMSAR

- Lås hjulbromsarna medan bordet används.

4. Tekniska data

Mått	60,5 x 40,2 cm
Bordsskivans mått	60 x 40 cm
Justering av bordsskivans vinkel	0° - 90°
Höjdjustering	72-112 cm

Vikt	6,7 kg
Maximal belastning	10 kg
Hjuldiameter	1,50"

5. Anmärkningar

Timago International Group ansvarar inte för felaktig användning av produkten, underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifterna eller användning i strid med avsett ändamål.

6. Underhåll

Produkten ska rengöras med en fuktig trasa och därefter torkas noggrant. Slipande rengöringsmedel får inte användas eftersom de kan skada skyddsbelägningarna. Smuts ska regelbundet avlägsnas från produktens rörliga delar (t.ex. gångjärn, klämskruvar och låsmekanismer).

7. Förvarings- och transportförhållanden

Produkten får inte utsättas för direkt solljus, vatten eller fukt.

8. Garantiinformation

Alla produkter som distribueras av vårt företag omfattas av en garanti vars villkor beskrivs i garantikortet på vår webbplats. Kontakta återförsäljaren där du köpte produkten. Tänk på att inköpsbeviset (kvitto eller faktura) måste sparas för garantiärenden.

9. Tillbud med medicinteknisk produkt

Alla allvarliga tillbud som rör en medicinteknisk produkt ska rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den EU-medlemsstat där användaren eller patienten är bosatt.

10. Märkning

	Katalognummer		Tillverkare
	LOT-nummer		UDI-kod
	Serienummer		Medicinteknisk produkt

	Obs		Läs bruksanvisningen
	Produkten uppfyller Europeiska unionens lagkrav för medicintekniska produkter (MDR 2017/745).		

Hela vårt produktsortiment finns hos våra distributörer. Läs mer på: **www.timago.com**. Tack för att du valde Timago!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com

