

SIT GO

OPTIMA PLUS | BC-EC8002-HD



ANVÄNDARMANUAL FÖR ELEKTRISK RULLSTOL

CE | MD

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Introduktion
2. Försiktighetsåtgärder för säker användning
3. Tekniska specifikationer och struktur
4. Montering, justering och hopfällning
5. Användning, drift och fel
6. Underhåll
7. Transport och förvaring
8. Garanti



1. Introduktion

1.1 Produktbeskrivning

Letar du efter en bättre vardag med mer rörlighet? Den elektriska rullstolen Sitgo OPTIMA PLUS ger dig precis detta. Stolen kombinerar avancerad teknik med en modern design. Du kan enkelt montera stolen. Du kan också snabbt demontera den. Detta gör stolen perfekt för transport i bilen. Chassit består av förstärkt kolfiber. Materialet gör rullstolen mycket stark. Det gör också stolen ultralätt.

1.2 Rekommenderad användning

Stolen hjälper personer med nedsatt rörlighet.

- Du får maximalt belasta stolen med 200 kg.
- Du kan använda stolen inomhus och utomhus på plana ytor.
- Du måste undvika gräs, grusvägar och branta backar. Du måste också undvika regn och snö.

1.3 Ytterligare information

Läs manualen noggrant före första användningen. Du uppnår säker användning genom att följa instruktionerna i denna manual. Företaget täcker inte skador om du använder stolen felaktigt. Har du frågor? Kontakta din återförsäljare idag!

2. Försiktighetsåtgärder för säker användning

Följ dessa enkla regler. De skyddar dig, och de skyddar stolen.

- **Exklusiv användning:** Stolen är endast för en person. Du får inte använda stolen för sport eller tung last.
- **Armstöd och fotstöd:** Du får inte använda armstödet för att lyfta dig själv. Du får inte stå med full vikt på fotstödet. Detta förhindrar skador.
- **Ändringar:** Du får inte ändra stolen. Obehöriga tillbehör förstör produkten.
- **Vatten:** Du får aldrig köra i regn. Du får inte köra på våta golv.
- **Backar:** Du får inte köra i branta backar. Backen får maximalt luta 6 grader. Du får aldrig köra över hinder som är högre än 25 mm.
- **Manuellt läge:** Du får endast använda manuellt läge med hjälp av en ledsagare.
- **Elektrisk säkerhet:** Håll laddaren ren och torr. Du får aldrig ladda ett vått batteri.

3. Tekniska specifikationer och struktur

3.1 Mått och egenskaper

Egenskap	Värde	Egenskap	Värde
Totala mått	113 x 71,5 x 105 cm	Batteri	24V/30AH
Hopfällda mått	41,5 x 70,5 x 86 cm	Batterivikt	3 kg
Sitthöjd	56 cm	Laddare	Utgång 5Ah
Sittbredd	49,5 cm	Max. belastning	200 kg
Ryggstödshöjd	50 cm	Max. hastighet	6 km/h
Bromssträcka	1500 mm	Max. räckvidd	25 km (plan väg)
Vändradie	900 mm	Motorer	24V/250W x 2
Max. rekommenderad lutning	6° (aldrig över 10°)	Bakhjul	12" massiv magnesium
Totalvikt	18,6 kg (utan batteri)	Framhjul	8" massiv magnesium

3.2 Huvudkomponenter

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Ryggstöd | 1. Motor |
| 2. Sittdyna | 2. Bromshandtag |
| 3. Batteri | 3. Tippskyddshjul |
| 4. Joystick | 4. Fotstöd |
| 5. Justerbara armstöd | 5. Ram / Chassi |
| 6. Fram- och bakhjul | |

4. Montering, justering och hopfällning

4.1 Montering

Vill du göra stolen redo för användning? Följ dessa steg:

1. Ta ut rullstolen ur lådan.
2. Dra fotstödet framåt.
3. Håll ryggstödet med ena handen. Håll sitsen med den andra handen. Dra isär delarna. Du hör ett klick när låset är fastsatt.

4. Anslut joysticken och placera den på önskat armstöd.
5. Placera batteriet under sitsen och se till att det är fulladdat.
6. Starta stolen och kontrollera funktionen.
7. Lägg dynan på sitsen. Nu är du redo att köra!

Obs: Kontrollera alltid låset innan du sätter dig.

4.2 Justeringar

- **Joystick:** Anpassa joysticken till din arm. Lossa knappen. Flytta joysticken. Dra åt knappen igen.
- **Bromshandtag:** Skjut handtaget bakåt för elektriskt läge. Skjut handtaget framåt för manuellt läge.
- **Armstöd:** Tryck på låsknappen för att fälla upp eller ner armstödet.
- **Fotstöd:** Justera fotstödet djup för att hitta en bekväm position.



Pestillo cierre (Låsmekanism)



Joystick kontrollpanel

4.3 Hopfällning

1. Dra i låset på baksidan av stolen.
2. Fäll upp sitsen.
3. Fäll upp fotstödet. Fäst fotstödet med tejp under transport.

5. Användning, drift och fel

5.1 Användning av Joystick

Joysticken styr din rullstol. Den är lätt att använda.

- **På/Av:** Tryck på knappen för att starta.
- **Indikatorer:** Skärmen visar ström och hastighet.
- **Hastighet:** Använd knapparna för att ändra farten.
- **Styrning:** Rör spaken i önskad riktning.
- **Tuta:** Använd tutan för att varna i trafiken.

Lås joystick: Håll startknappen nere i 5 sekunder.

Lås upp igen: Håll tutknappen nere i 5 sekunder.

5.2 Laddning av batteriet

- **Första gången:** Ladda batteriet helt i 6-8 timmar före första turen.
- **Daglig laddning:** Stäng av stolen. Sätt laddaren i joysticken. Sätt sedan laddaren i eluttaget. En röd lampa visar laddning. En grön lampa visar ett fullt batteri.

Varning: Du får aldrig köra i stolen under laddning.

5.3 Vanliga fel

- **Kod C4:** Bromsen är i manuellt läge. *Lösning:* Skjut bromshandtaget bakåt.
- **Kod LC:** Joysticken är låst. *Lösning:* Håll tutknappen nere i 5 sekunder.

Kontakta din serviceverkstad vid andra fel.

6. Underhåll

En välskött stol ger en bra tur. Alla lager i hjul och motor är förseglade. Du behöver inte smörja dem.

- **Dagligen:** Kontrollera batteriet och bromsen. Testa körningen.
- **Månatligen:** Kolla kablar och hjul.
- **Halvårsvis:** Gå igenom alla delar för slitage.
- **Årligen:** Låt en verkstad se över motor och skruvar.
- **Batteri:** Vi rekommenderar laddning varje dag om möjligt.

7. Transport och förvaring

7.1 Transport

Ta väl hand om din stol på resan! Transportera stolen i originallådan. Ta bort batteriet och packa in det i bubbelplast. Lägg aldrig tunga saker på en hopfälld stol.

7.2 Förvaring

Förvara stolen på en ren och torr plats. Temperaturen ska ligga mellan -10°C och 40°C. Ta bort batteriet vid längre förvaring. Ladda batteriet en gång i månaden.

8. Garanti

Vi levererar bra kvalitet. Vi ger dig en stark garanti.

- **Stolens komponenter:** 3 års garanti.
- **Chassi (ram):** 5 års garanti.
- **Batteri och laddare:** Minst 1 års garanti.

Garantin gäller inte i dessa fall:

- Obehöriga personer ändrar produkten.
- Du använder ooriginala delar.
- Du använder stolen för fel ändamål.
- Du överskrider viktgränsen.
- Stolen får stötar, faller eller blir våt.
- Slitdelar som hjul och klädsel försämras vid normal användning.
- Du kör i sand, pölar eller lera.

- Du låter batteriet stå utan ström under lång tid.

Symbol	Betydelse
SN / UDI	Serienummer / Unik enhetsidentifiering
[i]	Se bruksanvisningen
CE	CE-märkning
MD	Medicinteknisk produkt
EU REP	Representant i EU
!	Varning
kg	Maximal tillåten vikt

TILLVERKARE:

NINGBO BAICHEN MEDICAL DEVICES Co.,LTD.

Adress: Room 903, Diqu Building, 666 Taikang Middle Road, Ningbo, Zhejiang, Kina

EU-Representant:

SUNGO Europe B.V.

Fascinatia Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den IJssel, Nederländerna

Importör:

Guimi Evomedical, S.L.

Av Sant Esteve 157, 08211 Castellar del Valles, Barcelona, Spanien